

## 介護リフトつるべー


### 電装品収納手順



電装品の返却は、専用箱でお願い致します。  
箱サイズは、W 120, D 580, H 190 です。




①ダンボール内に発泡スチロール板を入れます。  
箱サイズに合わせてありますので、方向は一定です。  
半分のサイズの板は反対側で使用します。

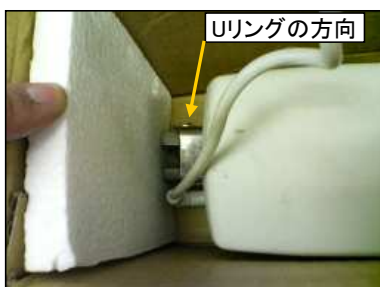

②差し込んだ発泡スチロール板にモーター下部が当たるように収納します。  
Uリングが上を向くように収納します。  
コードの収め方は、上記写真のようにします。断線の防止のためです。  
モーターはケース部分の膨らんでいる方を上向きに収納します。



③モーターのスピンドル部位(筒部分)の横に  
ステンレス棒とつまみネジを収めます。  
紛失が予想されますので、ビニール袋に  
入れるかテープで固定してください。  
(入れ忘れやすいので、注意して下さい)

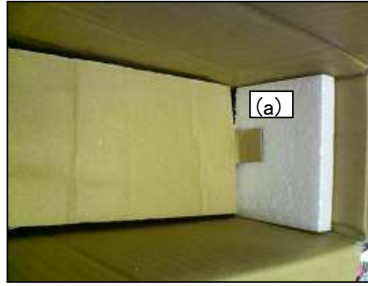

④モーターのスピンドル部位の上にダンボール平板を置きます。先端部を折り曲げて使用してください。このときに(a)の発泡スチロール板(小サイズ)をモーター先端部側に置いて下さい。



⑤ダンボール平板の上にコントローラーを置きます。方向については左写真を参照してください。コードはモール等で束ねるか、畳んだ状態にし、コード自体を縛るのはおやめください。コード断線の原因になります。コントローラー収納後、モーターの露出部分との間に発泡スチロールのブロックを挿入してください。




⑥スイッチのコードをまとめ、モーターの上に置いて下さい。汚れがひどい場合等は、他の部品の付着しないようにしてください。



⑦箱を閉じて、梱包用テープでしっかりと閉じてください。すでにガムテープ等が箱に付着している場合は、テープが付きにくいことがありますので、その場合はテープの種類を変更するか、ガムテープをはく離してから固定してください。

# 介護リフトつるべー

## Bセット(支柱)収納手順

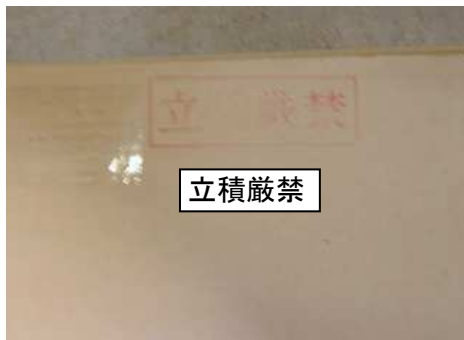

Bセット支柱の返却は、専用箱でお願いいたします。箱サイズは、W 270, D 1570, H 250 です。箱の方向が決まっています。縦積厳禁と書いてあるほうが、支柱先端部となります。破損防止のため、厳守願います。



**手順①**  
支柱全体にビニール袋を被せます。段ボール箱の上下を確認し、上方に段差のあるクッション材をおきます。置き方は写真を参照ください。その後、段差の無いクッション材を箱中央部におきます。クッション材の隙間に支柱を収納してください。この時、支柱下部のベース部の方向を合わせないと、段ボール箱を破損させることがあります。



段差の方向確認

破損に注意



安全フック

**手順②**  
安全フックが、輸送中に破損しないよう、エアキャップ等薄手の緩衝材を挟み込んで、動かないようにしてください。

**手順③**  
支柱先端部に、クッション材を置き、支柱を固定します。縦積厳禁のマークが見えるように、ふたを閉じね梱包します。ガムテープ等の二重張りに注意してください。破損の原因となります。



# 介護リフトつるべー

## Bセット(角パイプ)収納手順



Bセット角パイプの返却は、専用箱でお願いいたします。箱の種類は箱貼付のバーコードでご確認ください。箱サイズは、W 100, D 1840, H60 です。箱の方向は決まっていません。破損防止のため、箱全体を開いてから作業願います。



①角パイプ先端部に一箇所ある、アジャスターを短く収納してください。この時、+ドライバーを使用すると簡単です。アジャスターの収納は、ボルト部分を回転させてください。その他の部位は空転する場合があります。その後、角パイプ全体にビニール袋を被せます。



②角パイプ先端部に一箇所ある、アジャスターの反対側に、クッション材を置いてください。上記写真参照。その後、箱を閉じて、4箇所以上、固定してください。また、箱の上下部分もしっかりと固定してください。

# 介護リフトつるベー Bセット(ベースプレート)収納手順



Bセットベースプレートの返却は、専用箱  
でお願いいたします。箱の種類は箱貼  
付のバーコードでご確認ください。  
箱サイズは、W 530, D 530, H 150 です  
。破損防止のため、箱全体を開いてから  
作業願います。



Bセットベースプレートの中には、工具セ  
ットが同包されています。ねじ部品は、  
全てケースに収まるようになっていま  
す。不足の無いように梱包前に確認し  
てください。



Bセットベースプレートの数量は4種、4枚  
あります。全て形が違いますので、収納  
順序は写真を参照ください。  
①専用箱を開き、固定プレート付きのベ  
ースプレートを置きます。

②工具セットを置き、ダンボールのリン  
グを横に置きます。

③ベースプレートの2つ足タイプを置ま  
す。高さを合わせるために、足の無い側  
をダンボールのリングの上に置きます。



④プレートの隙間にクッション材を差し込みます。これで、プレートが動かないのと同時に、工具セットも飛び出しません。その後、緩衝用ダンボール板を敷きます。



⑤ベースプレートが一番小さい独立型を置き、細長いダンボールで巻きつけるようにします。その後、左右から緩衝材で挟みこみます。



伸ばしたまま  
にしておく



⑥一番大きなベースプレートを置きます。段ボール箱が膨らんでいないことを確認し、テープで封をします。



## 介護リフトつるべー

### Bセット(アウトリガー)収納手順



Bセットアウトリガーの返却は、専用箱でお願いいたします。箱の種類は箱貼付のバーコードでご確認ください。

箱サイズは、W 175, D 1570, H 75 です。

箱の方向は決まっていません。

破損防止のため、箱全体を開いてから作業願います。



#### 手順①

アウトリガー先端部の平板部分とパイプ部分に、クッション材を置いてください。左記写真参照。

その後、箱を閉じて、4箇所以上、固定してください。

また、箱の上下部分もしっかりと固定してください。



## 介護リフトつるべー

### Bセット(付属品)収納手順



Bセットの付属品は①のBセット用工具セット(ベースプレート内に同包)と、②取扱説明書・取扱説明ビデオ(※現在ではDVD。)のセット(アームの箱内に同包)があります。紛失や欠損に留意してください。



その他注意点として、梱包用テープは、ガムテープを uses と、重なった部分の粘着力が弱く、輸送事故の原因となります。重ならないように使用していただくか、透明テープをご利用ください。



# 介護リフトつるべー

## Bセット(アーム)収納手順



Bセットのアームは、2種類使用できます。ステンレス製アーム850mmと鉄製アーム850mmです。左の写真では別のステンレス製700mmです。箱寸法が違いますので、留意して下さい。

。返却はアームごとの専用箱でお願いいたします。箱の種類は箱貼付のバーコードでご確認ください。

尚、ステンレス製は「SUS」と記載、鉄製は無地です。

箱サイズは、W 360, D 1065, H 100 です。アームの長さにより箱サイズは変わります。箱の方向は決まっていません。破損防止のため、箱全体を開いてから作業願います。



### 手順①

#### 【アームカップ】

エアークッションを適当な大きさに切り、アームカップに巻きつけます。

#### 【ハンガー】

エアークッションを適当な大きさに切り、ハンガーに巻きつけます。

### 手順②

#### 【アームカップ】

エアークッションを紙テープ等で止め、残った部分を押し込みます。

#### 【ハンガー】

エアークッションをハンガーフックに押し込みます。残った部分でさらにハンガーに巻きつけます。その後、紙テープ等で固定します。ハンガーの保護は内側の片方だけです。



手順③  
【アームカップ】  
アームカップを内側に折り畳んで収納します。



【ハンガー】  
ハンガーをアームに密着させます。フック先端でアームが傷つかないように注意してください。



手順④  
全体をビニールで覆ってください。  
その後、箱に収め、取扱説明書・取扱説明ビデオを同包してください。  
箱をテープで固定してください。

