


2. 共通部品の取りはずし方

(1) アームとモーターの分離

- ①アームカップに固定してあるツマミネジをゆるめます。
- ②モーターの外筒部を支えながらアームを持ち上げて、アームカップからモーターの先端部をはずします。
- ③アームをアーム受にあたるまで下げてください。


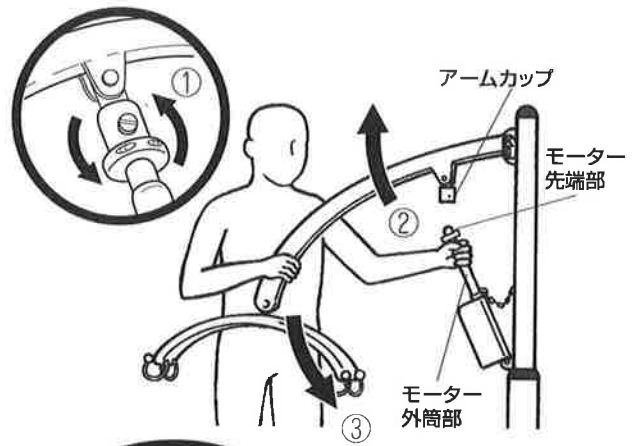


(2) アームのはずし方

- ①アーム取付け部の安全フックを解除します。
- ②アームをアーム取付け部からはずします。

アドバイス

アームの先端(ハンガー側)を持ち上げるとスムーズにはずせます。

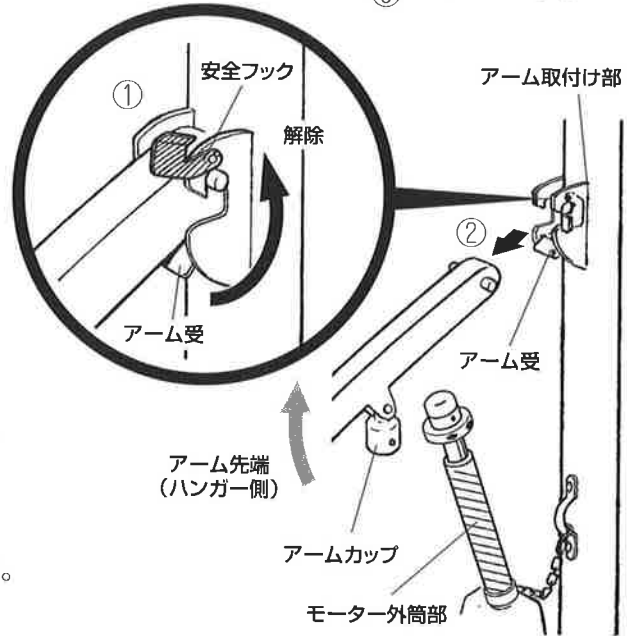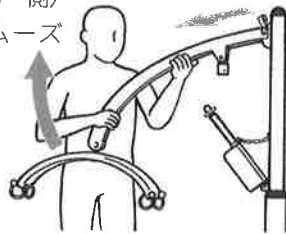

(3) モーターのはずし方

- ①モーターの外筒部を片手で支え、安全チェーンをはずします。
- ②モーター下部のUリングを手前におこします。
- ③モーターを持ち上げモーター受からはずします。

3. 手動上昇下降の使い方

※手動上昇下降装置は、電装品の故障、断線、停電等動かなくなった時に使用します。

アドバイス

動かなくなった時はまず、12ページのVIII.困ったときはお読みください。

■手動上昇下降装置の使い方

- ①電源プラグをぬいてください。
- ②ツマミネジを取り外してください。
- ③付属のステンレス棒を貫通穴に差し込んでください。
- ④上から見て右回転で下降、左回転で上昇します。
- ⑤安全な移乗先に移動してください。
- ⑥移動後は使用を止め、購入先またはメーカーまでご連絡ください。

