

EVE・PAOシリーズ

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品のご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、取り扱い手順に従いご利用ください。
また本取扱説明書はスリング装着の基本的な方法について解説しています。ご利用いただく方の身体状況や使用環境によって取り扱いが違います。詳しくは専門家にご相談ください。お読みになられた後も、大切に保管してください。

■サイズ及び組成表

EVE(エヴァ)シリーズ

EVE210	ハーフタイプ	中サイズ	脚分離	首や体幹支持の比較的安定した方、目安身長150～190cm
EVE220	ハーフタイプ	小サイズ	脚分離	首や体幹支持の比較的安定した方、目安身長135～150cm
EVE240	フルタイプ	中サイズ	脚分離	首や体幹支持が比較的弱い方、目安身長150～190cm
EVE250	フルタイプ	小サイズ	脚分離	首や体幹支持が比較的弱い方、目安身長135～150cm
EVE260	ネックサポート			首や体幹支持が比較的弱い方でハーフタイプに結節して使用

PAO(パオ)シリーズ

PAO340	パオメッシュグレーフル	中サイズ	シート型	全面メッシュ生地、目安身長150～190cm
PAO350	パオメッシュグレーフル	小サイズ	シート型	全面メッシュ生地、目安身長135～150cm

材質

シート部 …………… ナイロン

クッション(頭部) …… SBR(スチレンブタジエンゴム)

クッション(脚部) …… EPE(発泡ポリエチレン)

メッシュ部 …………… ポリエステル

ベルト …………… ポリエステル

アジャスター …………… POM(ポリアセタール樹脂)

適応最大荷重 …… 140kg



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

1 使用上の注意



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性がある内容を記載しています。

- 使用前点検は必ず行ってください。スリングは消耗品です。スリングに破れやほつれがないことを確認してください。ストラップや生地には擦り切れや裂け目、縫い目のほつれなどがないか、必ず点検するようにしてください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 体重が140kgを超える方にはご使用できません。但し、リフトの安全荷重が140kg以下の場合、リフトの安全荷重を限度としてください。
- スリングを鋭利なものに引っ掛けたり、こすったりしないでください。万一、破れたりした場合は直ちに使用を中止してください。
- 吊り上げ時に、スリングが車いす、固定物（家具、水道の蛇口など）に引っ掛かっていないか、確認して操作してください。車いすや固定物に引っ掛かって吊り上げると車いすや固定物、スリング、リフトが破損する恐れがあります。
- 両側にフックの付いたハンガータイプの吊り下げ式リフト以外に使用しないでください。
- スリングのストラップはリフトのフックに確実に掛けてください。ストラップが掛かっていることを確認した上で、吊り上げてください。対象者のストラップが張ったところ（お尻が浮くか浮かないかのところ）で一度止めて、ストラップが正しく掛けられているかどうか確認してください。
- スリングの改造はしないでください。改造により、スリングが破れて利用者が落下し、死亡または重傷を負う可能性があります。
- スリングを洗濯する際は、中性洗剤をご使用の上、手洗いをお勧めいたします。漂白剤の使用は厳禁です。生地や縫い目を著しく劣化させます。




注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生する内容を記載しています。


- スリングのストラップをハンガーのフックに掛けるときは、必ずハンガーを持って行なってください。ハンガーが揺れて、利用者にあたる可能性があります。
- 対象者を長時間スリングに吊り上げた状態にしないでください。利用者の身体的な負担になります。
- バックベルトは無理に上へ引き上げると破れの原因になるため、後ろに引いてください。

2 各部の名称と機能


〈エヴァ ハーフタイプ/ネックサポート〉

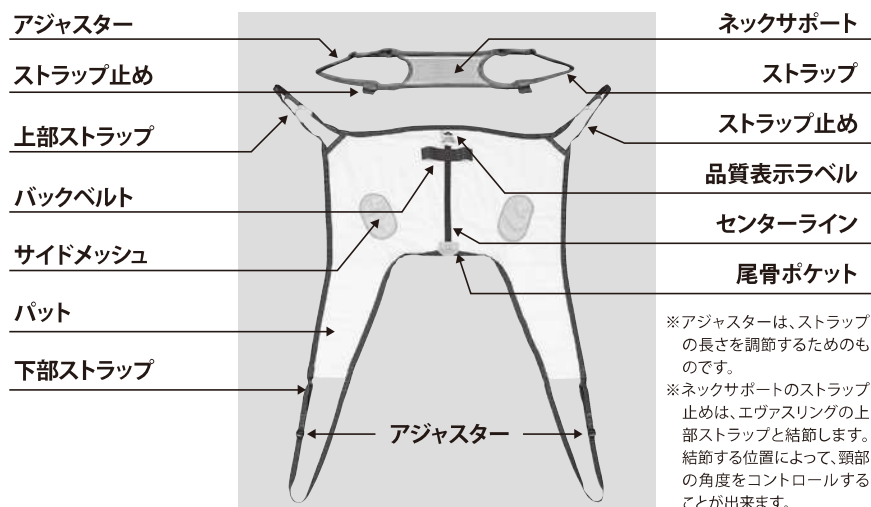

〈エヴァ フルタイプ〉

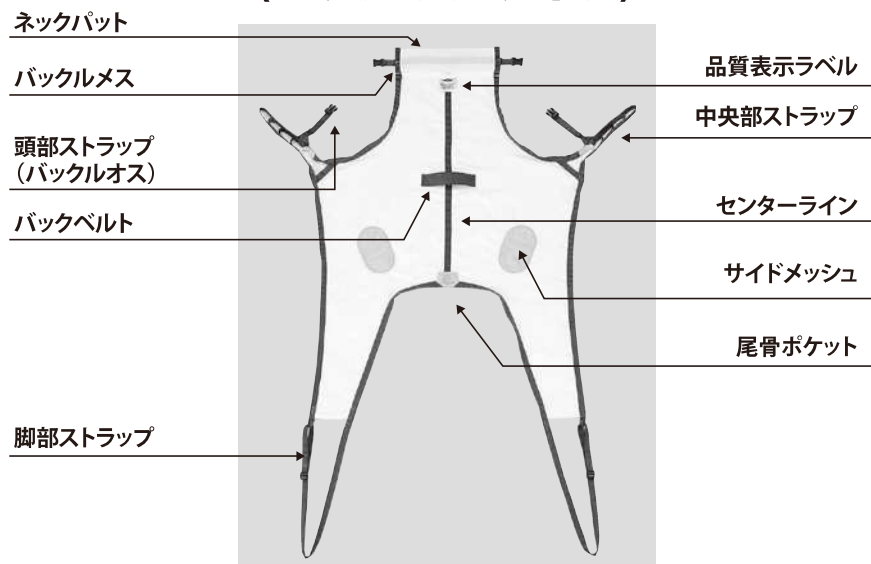

〈パオメッシュグレー〉

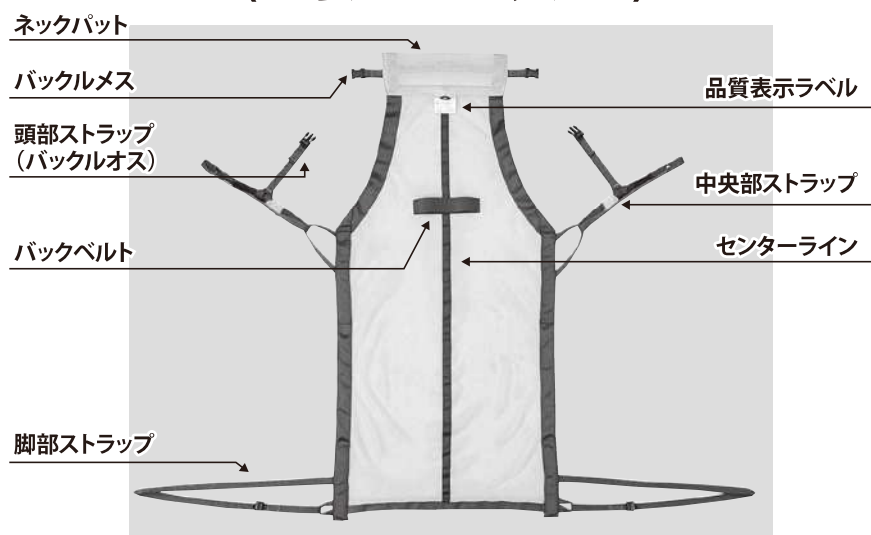

3 ネックサポートの特徴と使い方


- ① ハーフサイズの吊り具もネックサポートでフルサイズとして使用可能。容態が変化した時や、複数の方に使用する場合、ハーフサイズの吊り具も、フルサイズとして使用できます。



- ② 従来のネックサポートに比べ、頸部の角度を素早く簡単に調節できる。
ネックコントロールが容易に出来、安楽な姿勢が確実に確保できます。

ストラップの長さはアジャスターで調整可能

ストラップ止めの位置を変えることで頸部の角度を自在に調整することができます。

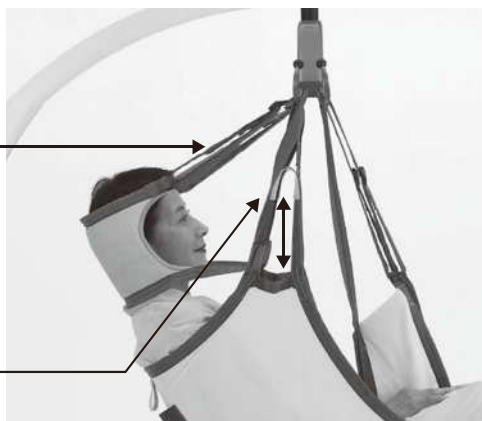

4 車いす上での装着方法(写真はエヴァ ハーフタイプ)



裏表を間違えないように、背中から差し込みます。車いすのキャスターやハンドルに引っかからないよう注意してください。



差し込み時には、シート下部にポケットがあります。指先を差し込み、尾骨の位置まで差し込みます。この時、シートのセンターラインが、背骨に沿うようにしてください。



脚部ストラップを臀部に沿わせるように差し込みます。大転子に引っかかりましたら、手でガイド(写真では左手)しながら座面まで敷きこみます。



左右の脚部ストラップの長さを合わせ、さらに軽く引っ張り、臀部の丸みに馴染ませます。

※片方ずつ行う場合は脚部のストラップを手前に引く際、反対側の脚部ストラップとひざを押さえて行ってください。



大腿部下に脚部ストラップを差し込みます。介助者が、車いすのフットサポートにひざを置き、その上に対象者の足を置いても結構です。症状により最適な方法を選択してください。脚部ストラップは大腿部全体を包み、股間側に寄せて差し込んでください。



引き出した脚部ストラップの長さを合わせます。



脚部ストラップの先端を交差させます。この装着方法を脚分離式スリングの交差式装着といいます。ほかにも装着方法がございます。専門家にお尋ねください。



脚部ストラップの長さが任意に設定可能です。寝かせた姿勢は脚部ストラップを縮め、起きた姿勢は伸ばしてください。調節は降りた状態で実施し、左右の長さを均一にしてください。

5 ベッド上での使用方法 エヴァ フルタイプ(エヴァハーフ)

(1) 装着方法



臥位姿勢をとり、スリングを利用者の横に置きます。



側臥位で、尾骨ポケットを尾骨に合わせ、シートの片側を体の下に差し込みます。

※パオメッシュグレーフルについてはP8をご覧ください。



スリングを体に被せ、センターラインを背骨に合わせます。



だぶついたシートを折り込んで、体の下へ差し込みます。



頭部を支えながらネックパットを差し込みます。バックルが顔等に当たらないよう注意してください。



反対側に体位変換し、体の下にあるスリングを引き出します。



スリングシートを広げて、整えます。



臥位に戻り、中央部ストラップの左右の長さを合わせます。



9 脚部ストラップを大腿部下に通します。

※パオメッシュグレーフルは膝裏にシートの下端があることを確認します。



10

脚部ストラップを交差させます。

※パオメッシュグレーフルはストラップを交差させる必要はありません

※頭部ストラップの調整が必要な場合11へ。調整が不要な場合14へ。



11

頭部ストラップの位置を調整します。通常は初期出荷状態で使用ください。



12

中間部ストラップの最適な段に通します。左右同じ段でご利用ください。

頭部ストラップループ



13

頭部ストラップループにバックルオスを通します。しっかり引っ張って締めてください。



14

ネックパットのバックルに頭部ストラップを接続します。



15

しっかりと固定されたことを確認してください。



(2) ベッドからの移乗



16

ストラップをハンガーに固定し、膝を曲げて、リフトを上昇させます。

※エヴァハーフを使用される場合は、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。エヴァフル、パオメッシュグレーフルは状況により、ベッド操作や首や肩を支えて操作してください。



17

頸部の角度が快適になるように、頭部ストラップの長さを調整し、ヒジや肩を前方に出して、圧迫を取り除き、ゆったりした姿勢をとります。



(3) ベッドへの移乗



18

最初はつま先を適所にガイドします。


※エヴァハーフを使用される場合は、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。エヴァフル、パオメッシュグレーブルは状況により、ベッド操作や首や肩を支えて操作してください。



19

臀部がベッドに着く前に、ベッド上の最適な位置を確認し、降下してください。

頭部がベッドボード等に当たらないよう注意してください。

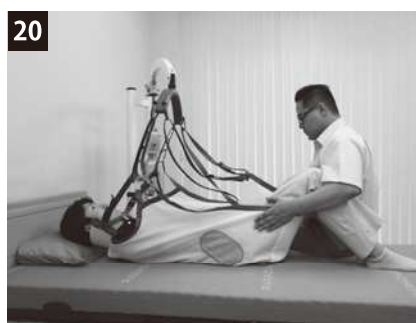

20

スリングが取り外せる位置までリフトを降下させます。

(4) シートの外し方



21

ハンガーを持ってスリングを外してください。(顔等に当たる場合があります。)



22

脚部ストラップの交差を解き、大腿部下部より抜き取ります。



23

ネックパットのバックルを外します。



24

側臥位になります。(写真は介助者側に側臥位)



バックルが体幹に当たらないようにし、体の下に差し込みます。



臥位姿勢にし、頭を持ち上げネックパッドを外します。体位変換し、スリングを抜き取ります。



6 ベッド上での使用方法 パオメッシュグレー

(1) 装着方法



側臥位をとり、シート下端を膝裏に合わせ、シート片側を体の下に差し込みます。



スリングを体に被せ、センターラインを背骨に合わせます。だぶついたシートを押し込んで、体の下へ差し込みます。



頭部を支えながらネックパッドを差し込みます。バックルが顔に当たらないように注意してください。



反対側に体位変換し、体の下にあるスリングを引き出します。



5

臥位に戻り、中央部ストラップの左右の長さを合わせます。

頭部ストラップの調整が必要な場合は6へ。調整が必要ない場合は11へ。



6

頭部ストラップの位置を調整します。通常は初期出荷状態でご使用ください。



7

中間部ストラップの最適な段に通します。左右同じ段でご利用ください。

頭部ストラップループ



8

頭部ストラップループにバックルオスを通します。しっかり引っ張って締めてください。



9

ネックパットのバックルに頭部ストラップを接続します。



10

しっかりと固定されたことを確認してください。



(2) ベッドからの移乗



11

ストラップをハンガーに固定し、リフトを上昇させます。
※状況により、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。
※肩の圧迫や膝裏のしわがあれば取り除いてください。

(3) ベッドへの移乗



12

着座する前に足の位置を調整します。



13 ハンガーを持ってスリングを外してください。
(顔等に当たる場合があります)



14 ネックパットのバックルを外します。



15 側臥位になります。
(写真は介助者と反対向き)

バックルが体幹に当たらないようにし、体の下に差し込みます。

注意:パオメッシュグレーフルは車いす上での着脱はできません。



16 臥位姿勢にし、頭を持ち上げネックパットを外します。体位変換し、スリングを抜き取ります。

■お手入れ方法

- ①洗濯は、中性洗剤を使用の上、手洗いをおすすめします。漂白剤の使用は厳禁です。生地やミシン糸を著しく劣化させます。
- ②洗濯機で洗う場合は、ネットに入れ、弱い水流で3分程度としてください。
- ③乾燥は陰干しをおすすめします。アイロンや熱風乾燥は、お止めください。
- ④ネットに入れたまま脱水してください。
- ⑤品質表示ラベルの表示をお確かめください。



製造発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

お客様相談室 ☎ 0120-65-2525

[モリトーホームページ] <http://www.moritoh.co.jp>

[E-mail] info@moritoh.co.jp

■本 社	〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36	TEL (0586) 71-6151	FAX (0586) 72-4555
■札幌営業所	〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101	TEL (011) 708-5200	FAX (011) 708-5201
■仙台営業所	〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22	TEL (022) 302-7914	FAX (0586) 72-4555
■埼玉営業所	〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103	TEL (048) 753-9393	FAX (03) 3777-1649
■東京営業所	〒143-0025 東京都大田区南馬込4-16-3	TEL (03) 3777-1648	FAX (03) 3777-1649
■中部営業所	〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36	TEL (0586) 71-6151	FAX (0586) 72-4555
■大阪営業所	〒538-0043 大阪府大阪市鶴見区今津南3-2-16	TEL (06) 4258-7105	FAX (06) 4258-7106
■岡山営業所	〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102号	TEL (086) 259-2910	FAX (0586) 72-4555
■福岡営業所	〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東一丁目12-1	TEL (092) 953-1892	FAX (092) 953-1973