

摩擦を少なくし、軽い力で移乗ができます！

介護保険貸与対象品

# 移座えもん ROLA




移座えもん ROLA-1800



移座えもん ROLA-1000

## ご使用方法

①要介護者を支え、ROLAを敷きこみます

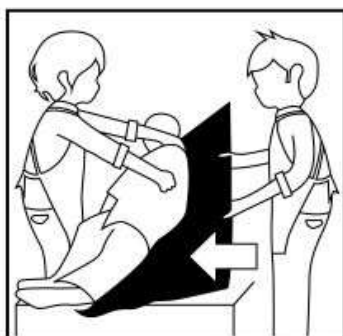

②要介護者を仰向けに戻します



③要介護者を移乗する方向へやさしく押します



- ベッドからストレッチャー、フルリクライニング車椅子などへの移乗に使用します。(移乗対象物との距離15cm以下)
- ローラのご使用は2名以上で行ってください。
- 長期間ご使用されますと滑りが悪くなります。定期的な外布の交換をお勧めします。

## 製品仕様

商品名

- ROLA-1800 サイズ 1800×500×16mm 重量4.2kg
- ROLA-1000 サイズ 1000×500×16mm 重量2.3kg

材質

- ボード 芯材:PP・ウレタン カバー:ナイロン(裏面PUコーティング) ハンドル:ナイロン
- 外布:ナイロン

最大使用者体重 100kg



二つ折りができるので持ち運びに便利です。

## 価格

ROLA-1800 ¥87,450  
外布 ¥14,850

ROLA-1000 ¥55,000  
外布 ¥12,100

製造発売元



お問い合わせ窓口 ☎0120-65-2525

[Moritohホームページ] <http://www.moritoh.co.jp>

[E-mail] [info@moritoh.co.jp](mailto:info@moritoh.co.jp)

- 本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36  
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 営業所 / 札幌・仙台・埼玉・東京・中部・大阪・岡山・福岡

モリト  
ホームページ



Facebookも  
チェック



※価格には組立費は含まれていません。機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。