


# つるべーBBセット取付組立要領書

(IKH20120501)

## BBセット 2関節タイプ 耐荷重 100kg

**BED**  
病院・施設向仕様 病院・施設での介護の負担を大幅に軽減できます。

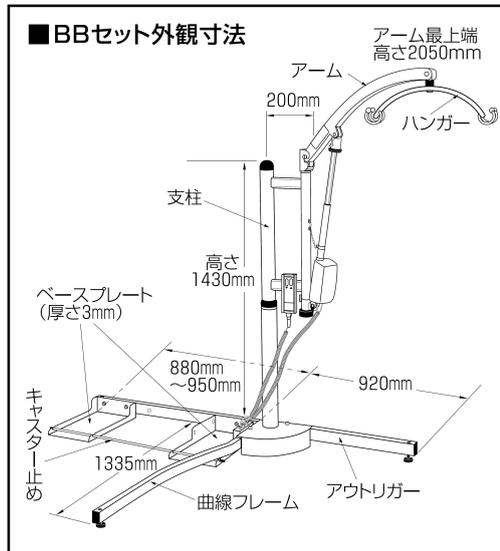


### 設置前の確認事項

- ① 商品点数の確認及び、箱の破損等のない事を見る
- ② 設置に必要である工具は以下の通りです。  
A カッターナイフ (開梱用)  
B メジャー (2m以上のもの)  
C 水平器
- ③ BBセット設置方向が左右どちらなのか確認する。  
※BBセットの支柱は頭側のみに対応しています。
- ④ ベッドの横幅を計測して下さい。
- ⑤ 床面が水平であることを確認して下さい。



### 梱包荷姿詳細

部品名	箱サイズ(mm)	梱包重量 (kg)
① 支柱	H315 D1410 W300	21.5
② アウトリガー	H100 D1850 W50	7.0
③ 曲線フレーム	H105 D1370 W155	5.3
④ 回転部	H110 D800 W320	8.6
⑤ ベースプレート	H175 D460 W270	9.3

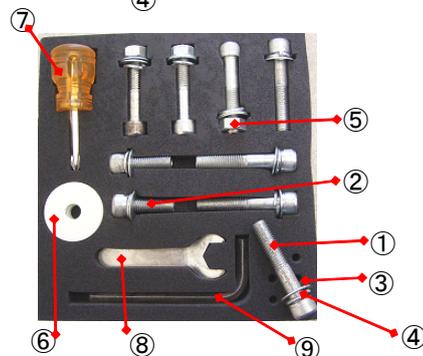

### 付属工具(固定部品)詳細

部品名	規格	入数	単位
① 六角穴付ボルト	M10×55mm	7	本
② 六角穴付ボルト	M10×30mm	2	本
③ ワッシャー	M10 (小)	12	個
④ スプリングワッシャー	M10	9	個
⑤ ナット	M10	3	個
⑥ 特製ワッシャー	φ40×10mm	5	個
⑦ ドライバー		1	本
⑧ スパナ	17	1	本
⑨ 六角レンチ	M8	1	本


\* 現在、工具箱の形状が変更しております。要領書の最終ページに写真を添付しております。



- ① アウトリガーは端に三連穴がある方がベッド側となります。設置位置を確認し、アジャスターの方向を決定して下さい。アジャスターは上下で差換えが可能です。アジャスターを3cm程伸ばします。




- ② アウトリガーは壁面から10cm程度離して設置します。  
ボルト固定の作業スペースを確保します。

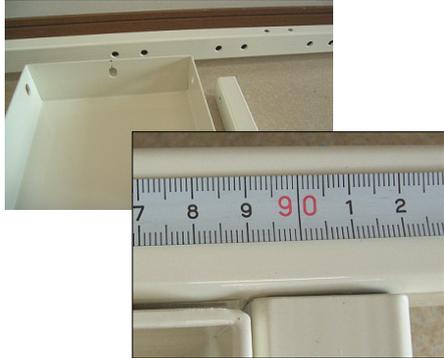

- ③ Rパイプとベースプレート(箱型)を仮置きします。  
ベッド幅により固定位置を選択できます。



- ④ ベースプレート(平型)の位置を決め、仮固定します。  
固定には付属の工具を使用します。  
ネジ方向とワッシャーの位置は下部写真を参照下さい。

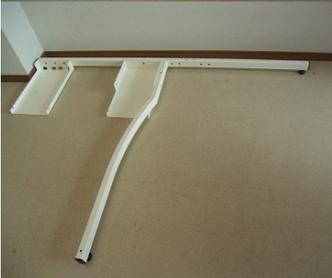

④ スプリングワッシャー

③ ワッシャー


⑥ 特製ワッシャー




- ⑤ ベースプレート(箱型)を④と同じ方法で一箇所仮固定します。



- ⑥ 支柱をRパイプとアウトリガーの上に重ねます。

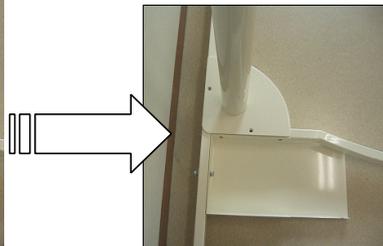


⑦ 下部写真の順で仮固定し、全ての仮固定が完了した後、増締めします。

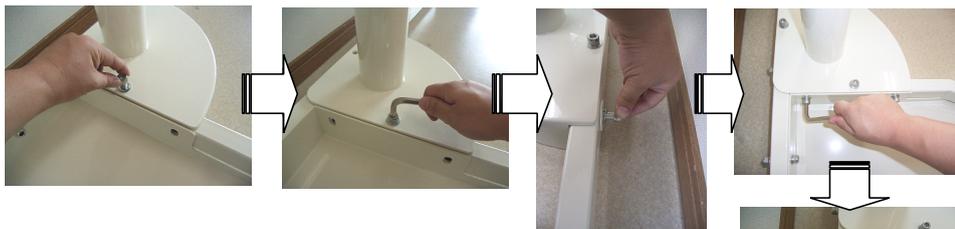

⑧ BBセットの位置を調整します。



⑨ 回転部を取り付けます。(回転部の安全ステッカー貼付を確認)

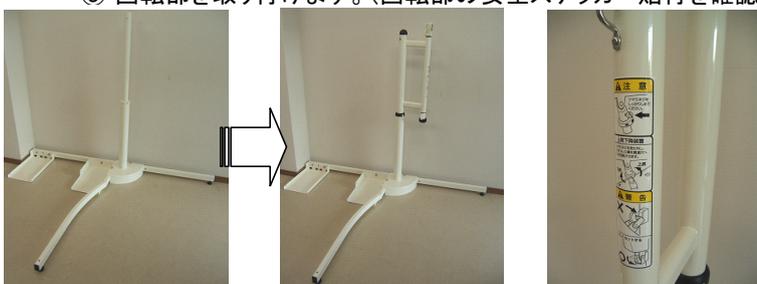

⑩ 回転部の回転角度は90度です。支柱の設置方向により調整して下さい。(固定ビス2箇所)




⑪ アーム回転角度を調節します。アームはアウトリガーと平行以上に回転しないように調整して下さい。参考写真のように固定ビスを設定します。



⑫ 水平の確認と調整をします。各部アジャスターを調整し、BBセットが水平に設置されていることを確認して下さい。水平は、アウトリガー中央部で確認して下さい。



⑬ BBセットにベッドを乗入れます。ベッドと壁面の位置関係を調整して下さい。

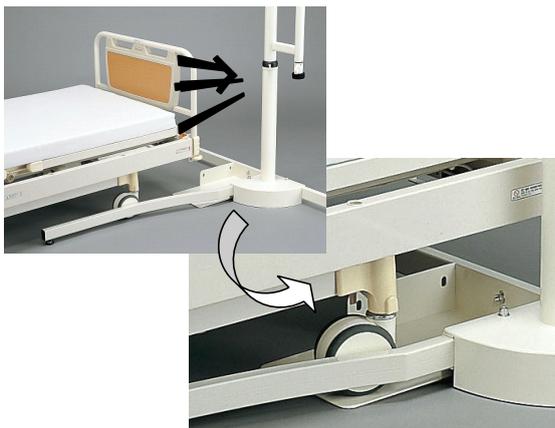

⑭ ステンレス棒(安全バー)を設置して下さい。



工具箱 姿図