


取扱説明書

介護リフト付ホーロー浴槽 OCTBATH

この度は、「介護リフト付ホーロー浴槽 OCTBATH」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。「OCTBATH」を安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。なお、使用方法に関しましては、基本的な事項に重点を置きましたので、それぞれの状況に応じた使用方法については専門家にご相談ください。

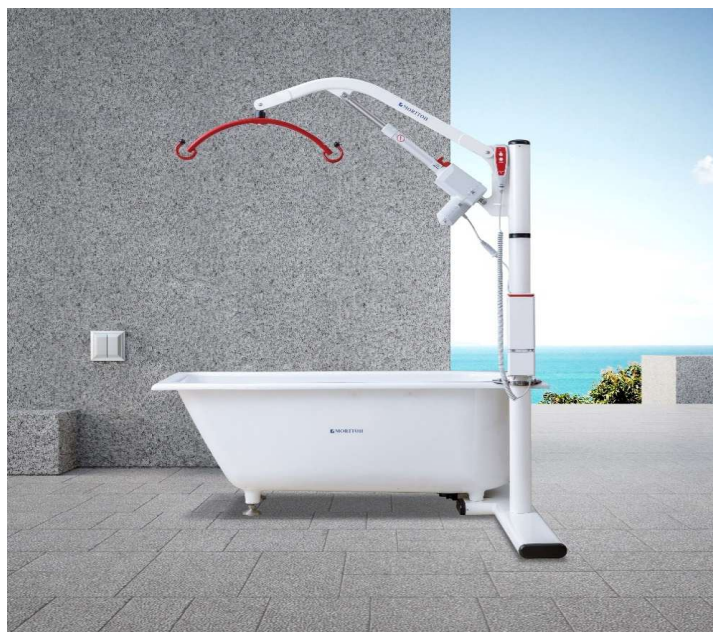

※お買い上げの製品は機器の仕様変更により、取扱説明書の内容が一部異なる場合があります。

もくじ

	ページ
I 安全に使用するためのご注意	2～4
II 各部の名称	4
III 電装品の使い方	5
1. スイッチの使い方	5
2. コントローラーの使い方	5
3. 充電器について	6
4. モーターについて	6
クイックリリース（手動下降装置）	
IV リフトの使い方	7
1. 洗い場から浴槽への移乗	7
2. 浴槽から洗い場への移乗	7
V 仕様	8
VI 困ったときは	9
VII 日常のお手入れと保管上の注意	9
VIII 点検について	10
メモ欄	11

I 安全に使用するためのご注意

安全表示ラベルについて

- 本機には、安全にご使用いただくために安全表示ラベルが貼付してあります。必ずお読みいただき、これらの注意・警告に従ってください。
- 安全表示ラベルが破損したり、なくなった場合または、読めなくなった場合は新しいラベルに貼り直してください。
- 安全表示ラベルは、お買い上げいただいた販売店に注文してください。



緊急停止ボタン(赤色のボタンを上から押す)

◀【緊急停止ボタンの解除方法】▶

左右の丸型ボタンを同時に押してください。

バッテリーが外れて、緊急停止が解除されます。使用するには、バッテリーを再度取り付けてください。



充電器



注意

BAL50(リチウムイオン電池)専用充電器

LED 1~3点灯	90~100%	
LED 1+2点灯	65~ 90%	
LED 1点灯	40~ 65%	
LED 1点滅	0~ 40%	
LED 1~3点滅	エラー(要点検)	
LED なし	接続不良	

充電器率表示

この安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を次の表示マークで区分し、説明しています。

	警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく事項の種類を次の図記号で区分し、説明しています。

	行ってはいけない「禁止」の内容です。		必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--------------------	---	----------------------

警告・注意事項は内容をしっかり把握してください。

禁止・強制の2項目で分類しています。

警告

-  入浴中は、浴槽の水を排出しないでください。排水口に手足や髪などが吸い込まれ、ケガをするおそれがあります。
-  お風呂のふたに手をついたりしないでください。ふたがはずれて、ケガをするおそれがあります。
-  OCTBATHは120kg以上の方に使用しないでください。(湯が入っていない場合は100kg以上) 耐荷重を超える方に使用すると、転倒、リフトの変形、破損の原因になります。
-  モーターをつかんでリフトを移動させないでください。故障・破損の原因となります。
-  濡れた手で、充電器の電源プラグを持たないでください。感電の恐れがあります。
-  OCTBATHの改造や分解をしないでください。機器の破損の原因となります。
-  被介護者だけで使用しないでください。必ず介護者のついた状態で使用してください。思わぬけがをするおそれがあります。
-  充電コードを重量物ではさんだりしないでください。コードが傷んで感電、焼損、漏電、火災のおそれがあります。(コードが破損した場合はただちに使用を停止し、交換してください)
-  充電プラグにほこりが付着したままコンセントに差さないでください。ショートにより感電、火災のおそれがあります。ほこりが付着している場合は乾いた布で拭き取ってください。

❯ 被介護者だけで使用しないでください。必ず介護者のついた状態で使用してください。思わぬけがをするおそれがあります。

❗ スリングは正しく装着してください。被介護者のバランスが崩れ、身体を圧迫したり、落下して死亡または重傷を負う可能性があります。スリングの取扱説明書を、必ずお読みいただき、正しくお使いください。

❗ 吊り具（スリング・分離型シャワーキャリー）のストラップの外れに注意してください。特に作動前にはストラップがしっかり掛かっていることを確認してください。落下事故の原因となります。

⚠ 注意

❯ 浴槽に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。ホーロー層がはくり、ケガをするおそれがあります。（はくりした場合は販売店に修理をご依頼ください）

❯ 熱湯をホーロー表面へかけないでください。ホーロー層がひび割れし、ケガをするおそれがあります。

❯ 浴槽のふちに乘らないでください。足をすべらせてケガをするおそれがあります。

❯ ヘアピンやカミソリなど錆びやすいものを浴槽表面に放置しないでください。もらい錆が発生し、とれなくなることがあります。

❗ 入浴前には必ず湯温を確かめてください。ヤケドをするおそれがあります。


❗ 風呂のふたを選ぶ場合は、浴槽のふちに十分かかる大きさのものを選んでください。ふたがずれ落ちておぼれたり、ケガをする場合があります。

❗ 浴室で使われている洗剤、殺虫剤、かび取り剤、その他薬品類は容器などに記載の注意表示に従って、正しくお使いください。使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、水もれや故障の原因になることがあります。

❗ ハンガーに注意してください。特にスリングを着脱するときは、ハンガーを手で支えて操作してください。

❗ お手入れをするときは、緊急停止ボタンを押した状態で行ってください。誤操作により、けがをするおそれがあります。

Ⅱ 各部の名称

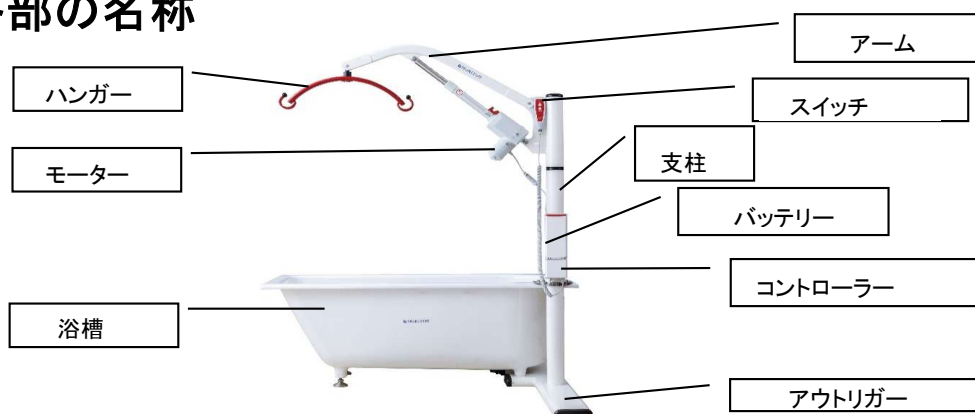

Ⅲ 電装品の使い方

1. スイッチの使い方

図 1

- ①スイッチでアームの上昇下降の操作を行います
- ②スイッチのボタンから手を離すと停止します



図 1

2. コントローラーの使い方

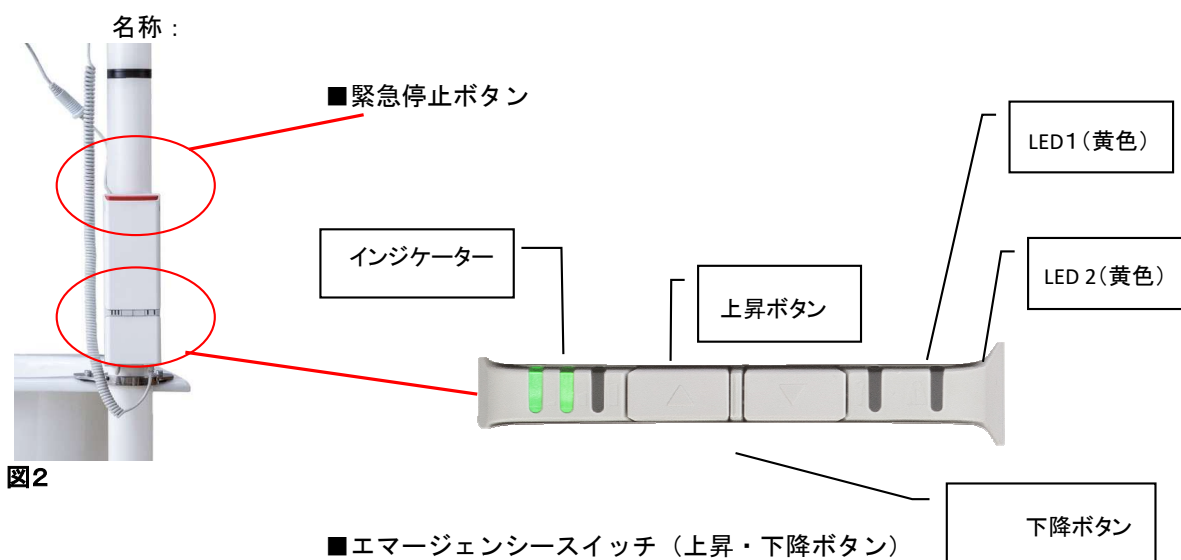


図2

- ①使用前にバッテリーの残量を確認してください。
図3を参照ください。
- ②操作中の誤作動を防止するため、または非常時に動作を停止したい場合はバッテリー上部の緊急停止ボタン(赤色)を押してください。
図2を参照ください。
※機能を復帰するにはバッテリー両端の丸ボタンを押すとバッテリーが外れ解除します。
使用するには、バッテリーを再度取り付けてください。
- ③スイッチの故障時にはエマージェンシースイッチ、上昇ボタン、下降ボタンを押してアームを上下動してください。

図3

インジケーター	LEDの状態	残量目安
	3本点灯	75～100%
	2本点灯	50～75%
	1本点灯	50%未満
	1本黄色点滅	微量 ただちに 要充電

LED1(黄色)+LED2(黄色)の表示説明

正常時、LEDは消灯しています。点灯及び点滅時の状態と対応については図4を参照ください。

図4

LED1+2	LEDの状態と動作	対応
	LED1点滅 動作不可	点滅解消 まで待機
	LED1+2点灯	緊急停止 ボタン 解除
	LED1+LED2 点滅(速) 動作不可	要点検
	LED1+LED2 交互点滅(遅) 動作不可	要点検

LED1+2	LEDの状態と動作	対応
	LED2点滅(遅) 一時動作不可	障害物に干渉して いないか確認
	LED1点滅(遅) 時動作不可	点滅解消 まで待機
	LED2点灯 作可	消灯するま で、モーター を縮める
	LED1点灯・動作可	要点検

3. 充電器について

名称:



●充電方法

充電器に下記写真のようにバッテリーを接続してください、電源プラグをコンセントに接続してください。



●充電目安時間:4時間
(消耗により異なります)

●バッテリーの交換
バッテリーケースのまま交換します。面倒な配線作業はございません。
※お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

●インジケータの表示について

インジケータ	LEDの状態	充電状態
	3本点灯	90~100%
	2本点灯 点滅 1本	65~90%
	1本点灯 点滅 1本	40~65%
	1本点滅	0~40%
	3本点滅	エラー (要点検)
	3本消灯	接続不良

3. モーターについて

●クイックリリース(手動下降装置)

手動下降装置「クイックリリース」は電源トラブルやスイッチの故障など、ご利用者をすぐに安全な場所へ降ろしたい時に使用します。レバー(赤)を矢印の方向に引っ張っている間、ご利用者を降下することができます。(図5)

※ご利用者を吊り上げていない場合など、アームに荷重が掛かっていない状態では、手動下降装置は動きません。

図5



IV リフトの使い方

●洗い場からの浴槽への移乗（スリング・分離型シャワーキャリー準備後）

回転するスピードを回転部調整ネジで調整できます。
荷重が掛かっている時に調整してください。図6

1. ご利用者が支柱に正対する向きにしてください
2. ハンガーのフックに吊り具のストラップを掛けてください。
! ストラップ全てがしっかり掛かっていることを確認してください。
外れていると落下事故の原因となります。

ハンガーがご利用者に対して、左右均等であることを確認ください。

ストラップがすべて、フックに掛かっていることを確認のうえ、スイッチのUP（上昇）ボタンを押して、ご利用者の臀部又は足が浴槽の縁に干渉しないところまで上昇させてください。
（肩や太もものにシワがあるときは伸ばしてください）

3. ご利用者のからだ（又は分離型キャリー）を支えて、手動で浴槽中央まで移動します。
（勢いよく移動するとご利用者の気分が悪くなるときがあります、やさしく移動してください）

スイッチのDOWN（下降）ボタンを押して、ご利用者を浴槽に入れてください。

※スリングの場合は、お尻が浴槽の床に付くか付かないかの位置で入浴してください
※分離型キャリーの場合は、浴槽の床に付いた状態で入浴してください


●浴槽から洗い場への移乗（スリング・分離型シャワーキャリー）

1. スwitchのUP（上昇）ボタンを押して、ご利用者の臀部又は浴槽の縁に干渉しないところまで上昇させてください。
（肩や太もものにシワがあるときは伸ばしてください）
2. ご利用者のからだ（又は分離型キャリー）を支えて、手動で洗い場まで移動します。
3. 支柱に正対する向きで、スイッチのDOWN（下降）ボタンを押して降ろしてください。

図6



V 仕様

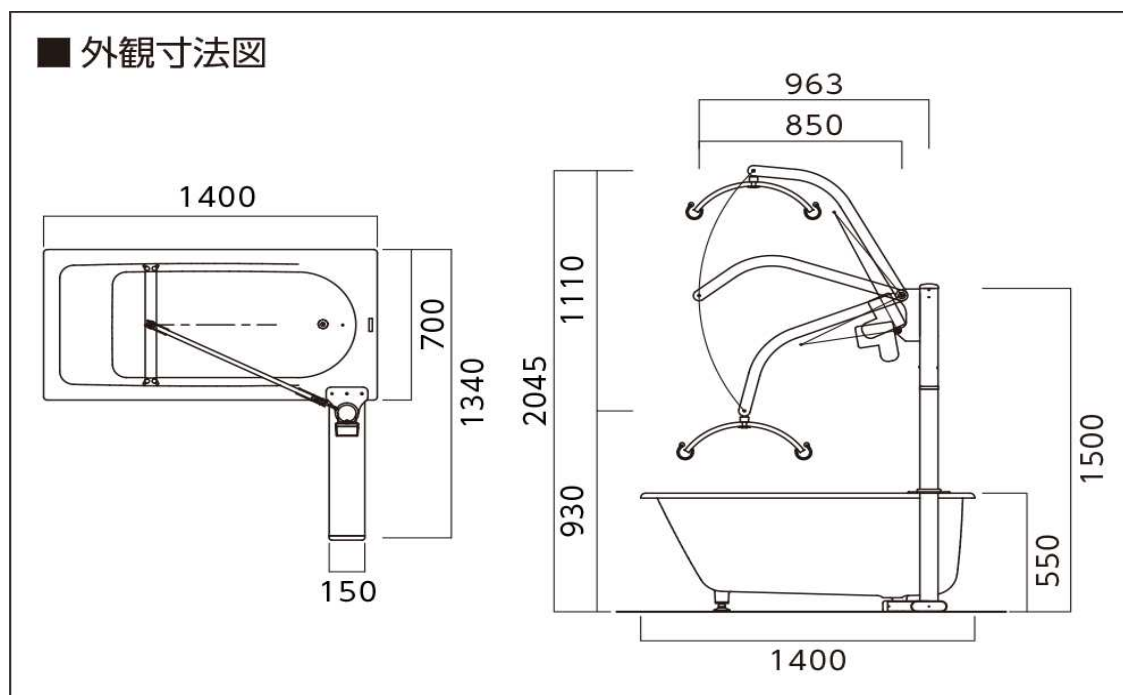

■ 搭載機能

緊急停止ボタン/挟み込み防止/クイックリリース/バッテリー残量表示/エマージェンシースイッチ

昇降速度	上昇	30.1mm/sec
昇降速度	下降	31mm/sec
耐荷重	(湯なし)	100kg
耐荷重	(湯あり)	120kg
上下ストローク		約1,110mm
アーム最上端高さ		2,045mm
サイズ	高さ	1,500mm
	長さ	1,340mm
	幅	1,110mm
材質		ステンレス

■ リチウム電池仕様

型式	BAL50
出力電源	25.2VDC
入力電源	29.4V
防水性能	IPX6
重量	0.9kg

VI 困ったときは

「介護リフト付きホーロー浴槽」をご使用の際、不具合が生じた場合は、下記の手順で対処いただき、改善されない場合は、販売店またはメーカーまでご連絡ください。

症状	対処方法
リフトが上昇・下降しない	1. スイッチ、モーターの各プラグがしっかり差し込まれているか確認してください 2. 動かない場合は、コントローラーの上下ボタン又はクイックリリースを使用し、ご利用者を安全な場所に移動してください ※ Ⅲ 電装品の使い方をご参照ください 3. 移動後は使用をやめ、販売店か弊社に連絡してください その他 ①緊急停止ボタンが押しこまれていませんか ⇒バッテリー両端の丸ボタンを押すとバッテリーが外れ解除します 使用するには、バッテリーを再度取り付けてください ②バッテリーの寿命になっていませんか ⇒バッテリーを交換してください
モーターに異常な金属音や振動がある	使用をやめ、破損の有無を確認ください 販売店か弊社に連絡し、症状をお伝えください

VII 日常のお手入れと保管上の注意



警告 モーターの伸縮部に洗剤をかけて掃除をしないでください。

●汚れがついているときは乾いた布で拭いてください。

●消毒について

0. 05%グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）の水溶液



注意 シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しないでください。
変色・変質させるおそれがあります。

●保管について



注意 使用しないときはアームを最下端まで下げて保管ください。

VIII 点検について

- 介護リフトを安全に使用いただくため、6年間（1回／年）無料点検を行います。

リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック、使用方法の確認（研修）

点検箇所	名称	点検項目
リフト本体	アーム	損傷、変形がないこと
	ハンガー	損傷、変形がないこと
	各部のボルト	各部ボルトのゆるみがないこと
	支柱	水平が取れていること 回転時に異音、がたつきがないこと（無荷重） 回転時に異音、がたつきがないこと（荷重）
	ラベル	剥がれや文字が見えにくくなっていないこと
電装品	スイッチ	正常にアームが上下動すること
	モーター	動作時に異音、著しい振動がないこと
	コントローラー	LED1+2が点灯または点滅していないこと
	エマージェンシースイッチ	上昇、下降ボタンが正常に作動すること
	緊急停止ボタン	押されているとき、上下動しないこと
	ラベル	剥がれや文字が見えにくくなっていないこと

- 使用時に、コントローラーのLED1または2が点灯または点滅が表示されたら
（Ⅲ 電装品の使い方 2 コントローラーの使い方 P5）を参照の上、点検ください。
- 日常点検を行い、異常がないことを確認の上、ご使用ください。
異常が見られた場合や不明な点がございましたら、ご購入いただいた販売店または弊社に
連絡し、症状等をお知らせください。

保証書

品 名	介護リフト付きホーロー浴槽「OCTBATH」
お客様	ご住所 〒
	電話番号
	お名前
お買い上げ日 西暦 年 月 日	
販売店名	
保証期間	3年間

この保証書は、本書及び保証規定に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本保証書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用方法において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 保証の対象となる部分はリフト一式です。ただし、摩耗・電装品（モーター・コントローラー・スイッチ）の断線・バッテリーの消耗など各部の消耗・劣化による故障、損傷は除きます。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書を紛失された場合
 - お買い上げ後の移動、設置、落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震等の天災地変による故障および損傷
 - 使用上の誤り、不当な改造や修理による故障および損傷
 - 本保証書の保証期間及び販売店の記載が確認できない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

株式会社モリトー 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

製造販売元



■本社 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付]

モリトーホームページ
E-mail

FAX (0586) 72-4555

0120-65-2525

<https://www.moritoh.co.jp>
info@moritoh.co.jp



■札幌営業所 / 〒063-0870	北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101	TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
■仙台営業所 / 〒981-1102	宮城県仙台市太白区袋原6-9-22	TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
■埼玉営業所 / 〒336-0025	埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103	TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649
■東京営業所 / 〒135-0063	東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー9階2号室	TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550
■中部営業所 / 〒491-0074	愛知県一宮市東島町3-36	TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
■大阪営業所 / 〒577-0016	大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号	TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
■岡山営業所 / 〒700-0954	岡山県岡山市南区米倉30-102	TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
■福岡営業所 / 〒811-1204	福岡県那珂川市片桐東1-12-1	TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
■関東大町 研修センター / 〒398-0001	長野県大町市大字平22393	TEL (0261) 23-1678

販売店

