

POPO 用ハーネス HV 装着方法について



各部名称



写真は S サイズ

ご案内

ハーネスハイブリッドは、前商品のクロロプレンとメッシュの両タイプの特徴を併せ持つ商品です。

形状、使用方法に変更ございません。

ハーネスクロロプレン、ハーネス、メッシュグレーは販売終了致しました。
座骨リング固定タイプ、座骨支持ベルトのゴム部 2020 年より廃止

装着方法

- ① ウエストベルトのマジック部を腰に軽く留めます




※写真はメッシュグレーです。

- ② 腿部内側のマジックテープを巻き付けます



③大腿部のマジックテープを外側から内側へ巻き付けます。(左足も同様に巻いて下さい)

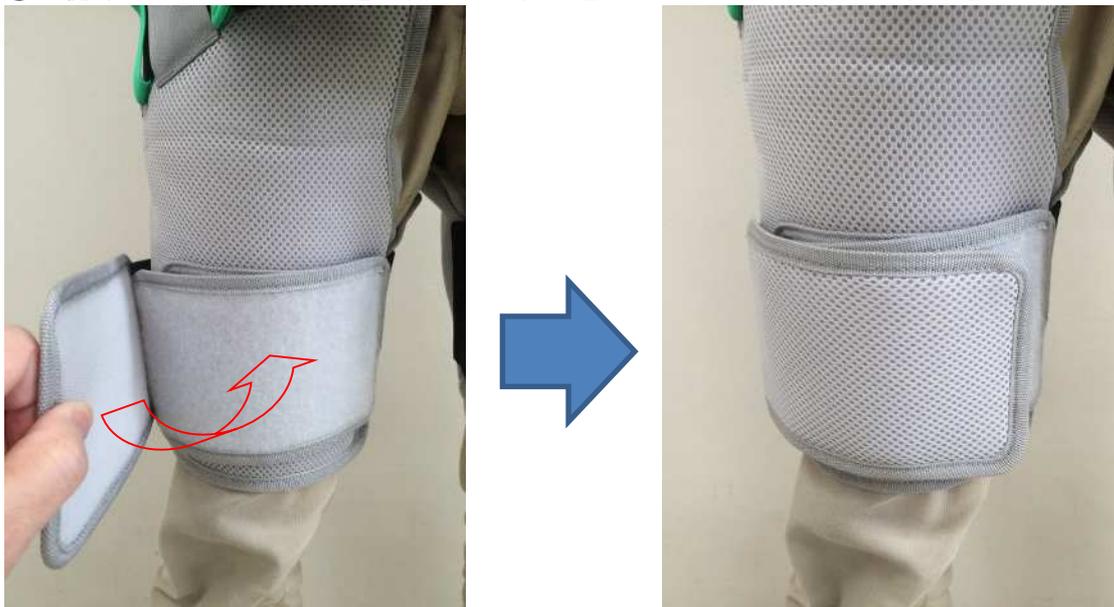

④裏側の座骨支持ベルトを被験者の座骨の下の位置に合わせます。



⑤座骨ベルトを締めてください。この時、きつく締めすぎないようにしてください



※締める際のポイント

①で緩みを作りながら②で引きます。

⑥ウエストベルトを装着します。(完成)



※締め付けの際は、⑤の※締める際のポイントを参考にして下さい。

POPO 用ラダーベルト接続方法

- ①座骨リングに POPO 用ラダーベルトを通します。(図 1)
- ②通したベルトのラダーを本体のアームフックへ引っ掛けます。(図 2)
 ※体型・体格によりラダーの位置を変更して下さい。

参考

座骨リングを移動されるとご本人様の吊り点が変わります。

骨盤の角度変更に合わせてご使用下さい。

※2020 年販売品より固定の座骨リングは廃止


(図 1)

座骨リングにラダーベルトを通します。



(図 2)

通したラダーベルトのラダー部分をアームフックへ引っ掛けます。

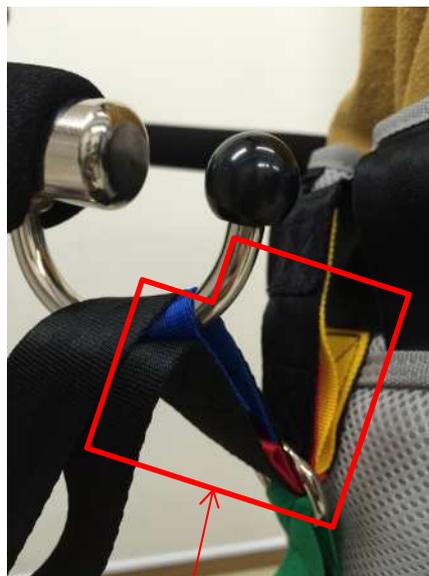

ラダー部

注意

- ・ 耐荷重は 100kg となります。体重が 100kg を超える方にはご使用できません。

お手入れ

- ・ 吊り具は消耗品です。破れやほつれがないことを確認してから、ご使用して下さい。発見した場合、直ちに使用を中止し、お求めになられた販売店にご連絡ください
- ・ 消毒は 5% グルコン酸クロルヘキシジン溶液を 100 倍希釈した溶液に浸漬してください
- ・ 洗浄は中性洗剤をご使用の上、手洗いをお勧めします



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリト



『安・楽・満』

安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが
満ち溢れた社会を創造します!

■ 製造販売元



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリト

- 本社 〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 札幌営業所 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東 1-1-57-101
TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
- 仙台営業所 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原 6-9-22
TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
- 埼玉営業所 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-6-103
TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649
- 東京営業所 〒143-0025 東京都大田区南馬込 4-16-3
TEL (03) 3777-1648 FAX (03) 3777-1649
- 中部営業所 〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 大阪営業所 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西 2-6-2-B
TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
- 岡山営業所 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉 30-102
TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
- 福岡営業所 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東 1-12-1
TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
- 信濃大町 研修センター 〒398-0001 長野県大町市大字平 22393
TEL (0261) 23-1678

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-65-2525

お問合せ [e-mail] info@moritoh.co.jp

ホームページ : <http://www.moritoh.co.jp>いつでも、どこでも、だれにでも 安・楽・満を提供しつづけることが大切です。
我々も含めたすべての人々が、安らぎと楽しみを満喫できることを願っています。