

VI. 保守・点検

【お手入れ方法】

使用後は乾燥させて下さい。

汚れがひどい場合には、シート類は外し、手洗いで洗浄を行なって下さい。

本体は中性洗剤を使用して下さい。消毒は塩素系は使用できません。(次亜鉛素酸ナトリウム)

汚れが取れない場合は、シート類を交換して下さい。

キャスター部に髪の毛等が絡みついた場合、ピンセット等を利用して取り除いて下さい。

消毒には弊社商品じょきん娘ハンドスプレーを推奨いたします。(詳細はホームページにて)

【シートの交換(取り外し、取付)】



VII. 困ったときは

「安楽キャリー」をご使用の際、不都合が生じた場合は、下記の手順で対処いただき、改善されない場合は販売店までご連絡ください。

症 状	対処方法
キャスターのネジが緩い	ネジをしめて下さい。
キャスターのブレーキがきかない	使用を止め、破損の有無を確認。販売店に連絡し、症状をお伝えください。
座面、背面、フットレストシートのベルクロ・バックルが破損している	使用を止め、破損の有無を確認。販売店に連絡し、症状をお伝えください。

お 願 い

上記のチェック項目・対処方法を行っても正常に作動しない場合には、必ず販売店または、弊社までご連絡ください。



安楽 キャリー

ANRAKU CARRY

安楽キャリーを安全にご利用いただくために、この取扱説明書を必ずお読み下さい。
なお、使用方法に関しましては、基本的な事項に重点を置きましたので、それぞれの状況に応じた使用方法については専門家に相談ください。

内容物・・・本体、プラスドライバー、補助ベルト×1、背シート、座シート、アームレスト(付)、保証書

I. 安全上のご注意



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重症を負う危険性がある内容を記載しています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、重傷を負う可能性が予想される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生する内容を記載しています。



① 100kg以上の方は使用しないでください。

② 目的以外には使用しないでください。

③ 身長180cm以上の方は使用しないでください。リクライニング時に転倒の危険があります。

④ リクライニング時は手を頭より上方に上げないでください。転倒の危険があります。

⑤ 片脚または両脚を切断している方は、リクライニング機能を使用しないでください。転倒の危険があります。

⑥ 体を洗う時など利用者の足を持ち上げないで下さい。転倒の危険があります。

⑦ 座シート、背シート等、その他のシート類は消耗品です。

⑧ 安楽キャリーは浴室内でご使用下さい。勾配の大きな所では使用しないで下さい。転倒の危険があります。

⑨ 温泉地等、腐食性の強い場所での使用は避け下さい。



① 直射日光に当てないでください。シートが劣化する恐れがあります。

② シートには、熱湯(60度以上)を、かけないでください。シートが硬化する恐れがあります。

③ シートを洗浄するときは、中性洗剤を使用してください。

④ シートを固いもので強くこすらないでください。

⑤ 筋緊張を伴う方は、リクライニング機能利用時、十分に気をつけて下さい。利用者がバランスをくずす恐れがあります。

II. 各部名称



AA
タイプ

一体型

耐荷重
100kg

オールステンレス
(SUS304)

背面角度6段階調節式リクライニング。
100mmキャスター採用で、移動が一層スムーズ。

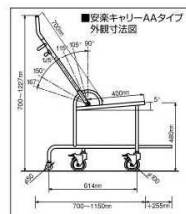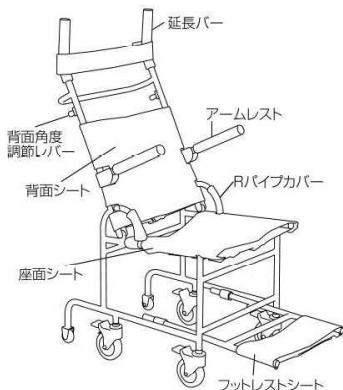

III. ご使用前の点検事項

- ① キャスターのネジが緩んでいないか点検してください。→緩い場合は締め直して下さい。
- ② キャスターのブレーキが正常に作動するか確認して下さい。
→ブレーキがきかない場合は販売店へ連絡して下さい。(キャスター交換)
- ③ 座面、背面、フットレストベルトのベルクロ・バックルが外れていないか確認してください。
- ④ 座面・背面シートのバックルに破損がないか確認して下さい。
→破損がある場合は使用をやめて交換して下さい。(シート交換)

※点検を行い、万が一異常な点がございましたら、4頁の「対処方法」を参照の上、対処してください。

IV. 基本的な使い方

(1) 背面角度調節の仕方

- ① 背面角度調節レバーを左右同時に引きますと背面のストッパーが解除されます。
下記の背面角度を選択して下さい。


(AAタイプは90/105/115/125/150/167の6段階)



背面に利用者の体重が掛かります。介助者が支えられなかった場合、背面が急激に倒れ利用者が落下し、死亡又は重大な傷害を負う可能性があります。
操作できない場合はあらかじめ角度調節をご利用下さい。

V. オプション・付属品 取付方法

■オプション品一覧図

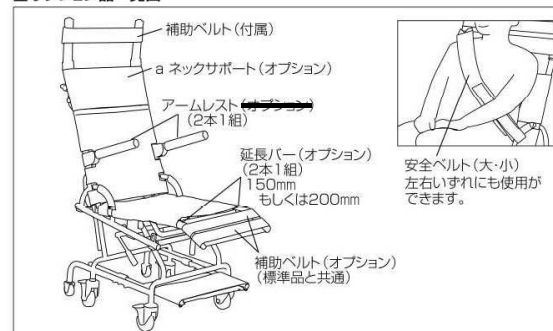

アームレスト、延長バーのスポンジは、破損した場合は新しいものと交換して下さい。

(1) 延長バーの付け方 (オプション) (図1)

- ① パイプキャップのネジを外し、延長バーを取り付けてください。
外したネジは延長バーの取付に使用します。
- ② 延長バーの位置を確認し、本体に取り付けます。
- ③ 外したパイプキャップは、別の場所に保管して下さい。
- ④ 延長バーは左右でネジ穴位置が変わりますのでご注意ください。

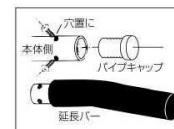


図1

(2) 補助ベルトの付け方 (図2)

- ① 補助ベルトの表裏を確認して、取り付けます。
ベルクロで張り調整を行って下さい。

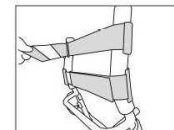



図2

(3) ネックサポートの付け方 (オプション) (オプション品一覧図 a)

- ① 背シートと補助ベルトの間に取り付けて下さい。
- ② バックルで張り調整を行って下さい。

(4) 安全ベルトの付け方 (オプション)

- ① 左右どちらでも使用できます。
- ② 対象者の座高に合わせ、肩の位置で合わせて下さい。

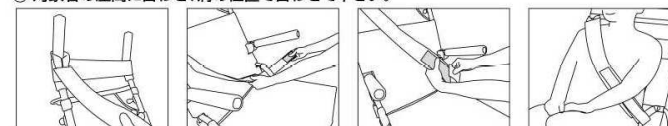

(5) 転倒防止金具 (オプション) (図3)

- ① 取付は販売店で行ってください。
- ② リクライニング時の安定性が良くなります。
【1. 安全上のご注意】に従ってご使用下さい。
- ③ 後付けができます。

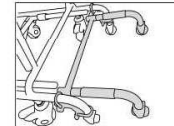


図3