


車搭載型介護リフト

V-LIFT 取付組立要領書〈製品の仕様は予告なく変更する場合があります〉

安全にお取付けいただくために、必ずお読みください。

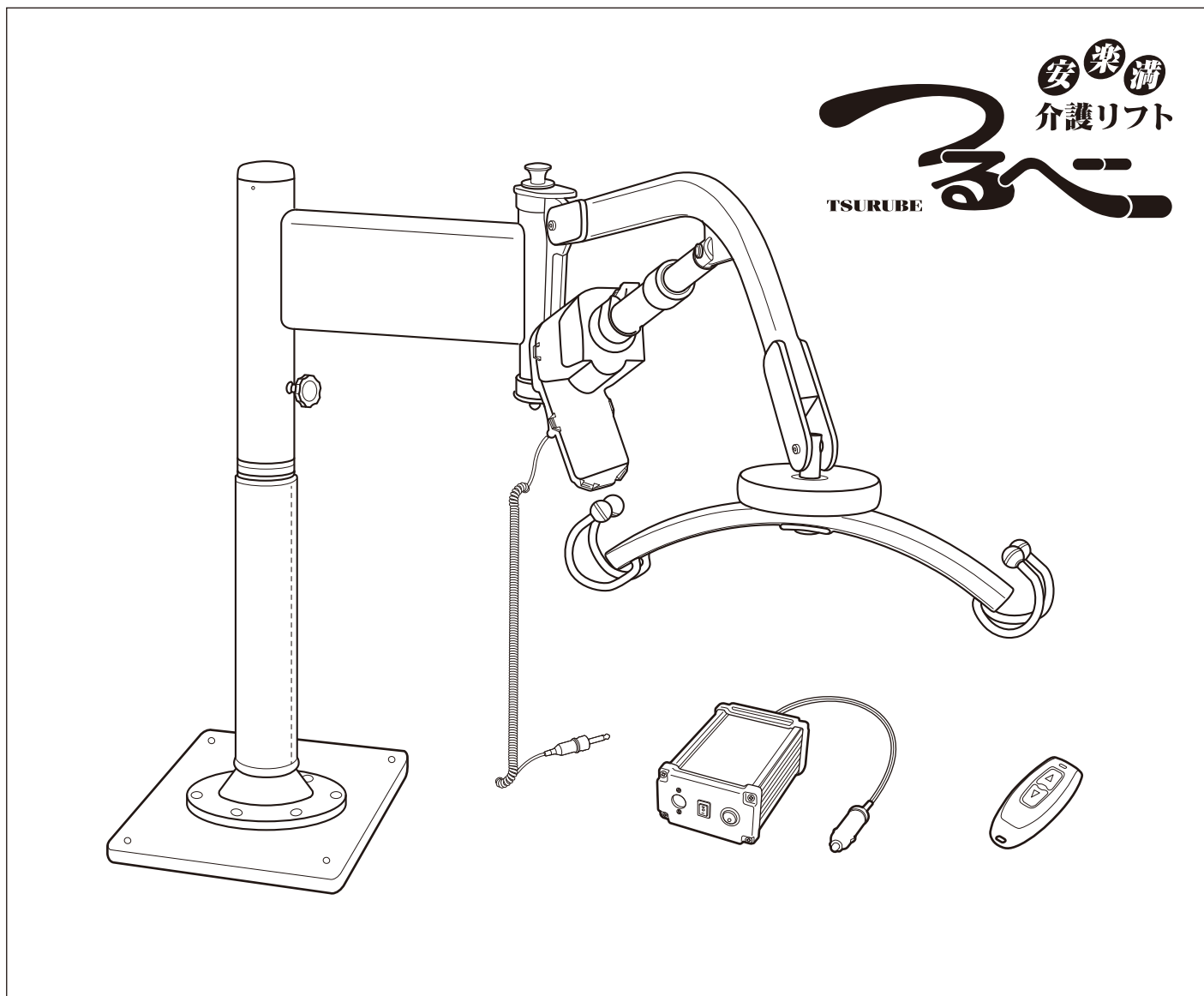

◆本書では、安全な作業をしていただくために、特にお守りいただきたいことを下記のマークで表示してあります。

 危険	指示に従わないと、生命の危機または重大な障害につながるおそれがあります。	 警告	指示に従わないと、生命の危機または重大な障害につながる可能性があります。
 注意	指示に従わないと、障害につながる可能性があります。	 アドバイス	取付け前にお客さまと調整した方がよいこと。




注意 | V-LIFT取付け時の注意点


- V-LIFT組立要領書の記載事項に加えて、取付け車両のサービスマニュアルに記載の整備情報や関連事項に準じて作業を行ってください。
- V-LIFT組立て前に作業の安全確保と確認を必ず行ってください。
- 取付け車両および各部品に傷を付けたり、破損しないように取り扱ってください。
- ボルト、ねじは必ず本要領書に指定されている部品を使用してください。安易に似ている部品を使用すると、支柱が倒れたり転倒して事故等の原因になるおそれがあります。
- 電装部品の保管および取付け作業は、直射日光の当たる場所やほこり等の出る場所では行わないでください。
(電装部品の故障原因となります)
- 取付け前にお客さまの身体状況や乗車される座席を確認して、支柱の取付け位置を選定してください。

構成部品


〈リフト部〉

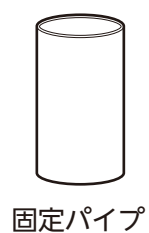

固定パイプ

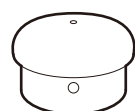

キャップ

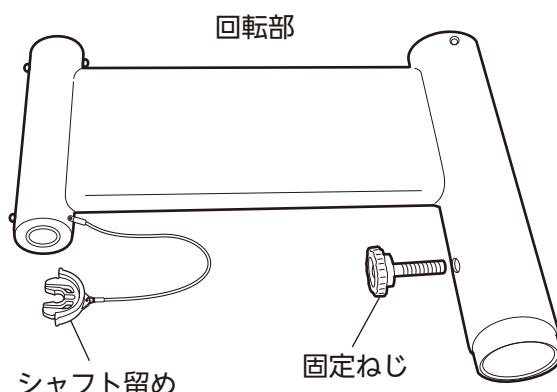

回転部

シャフト留め

固定ねじ



シャフト




支柱すべり金具




小ねじ



リモコンスイッチ
〈2個〉

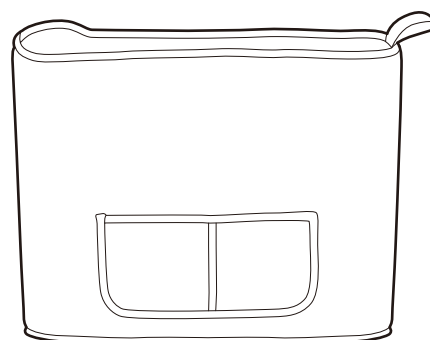


回転部保護カバー

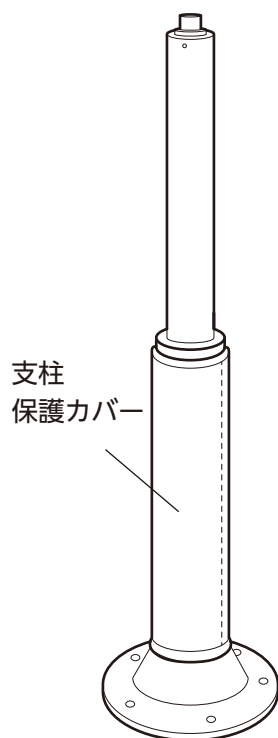


支柱
保護カバー

支柱


ハンガー

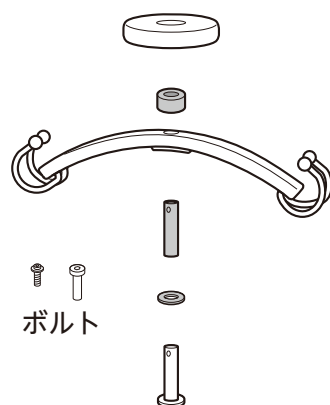


ボルト

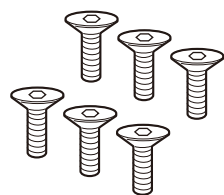

支柱ベース固定ボルト
M10×20mm 〈6本〉

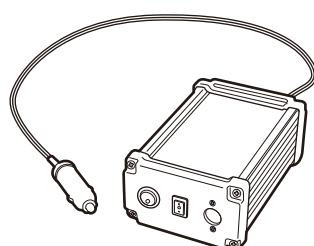

V-LIFT専用コントローラー


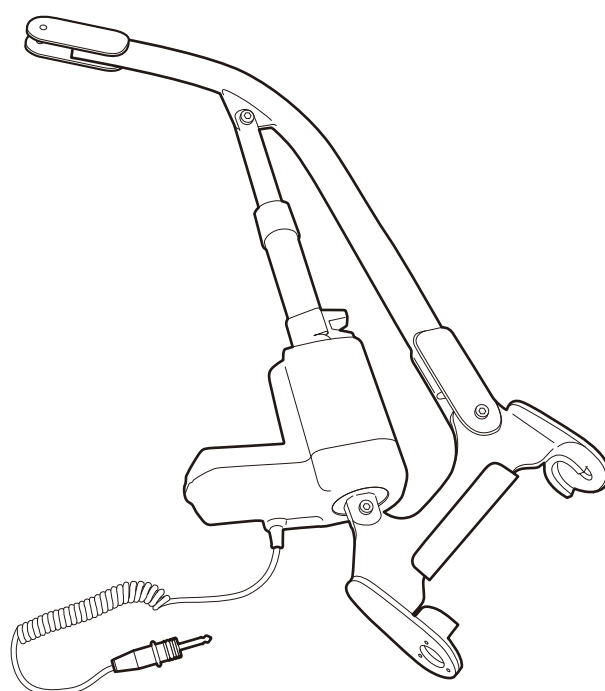


アーム・モーターセット


取付作業

1. 台座プレートと支柱の取付け

1

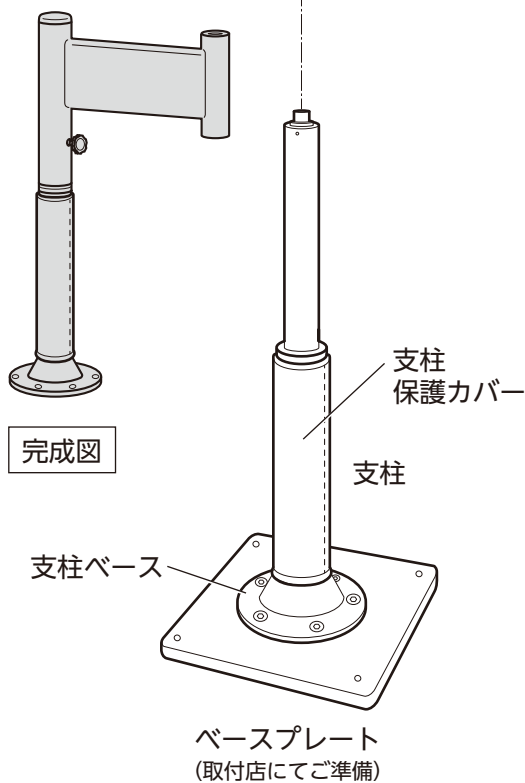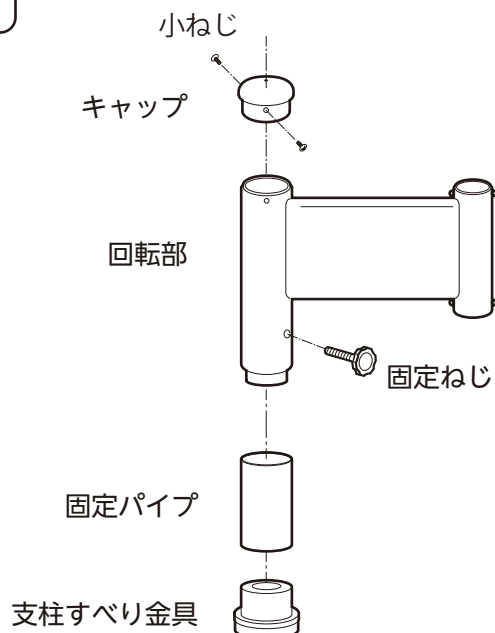

1. 支柱に支柱すべり金具、固定パイプ、回転部、キャップの順に取付けてください。

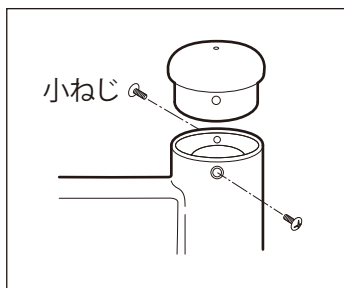


キャップを穴の位置に合わせてはめ、小ねじで留めてください。



アドバイス | 支柱の傾きの調整方法

※印：取付店にてご準備いただくもの

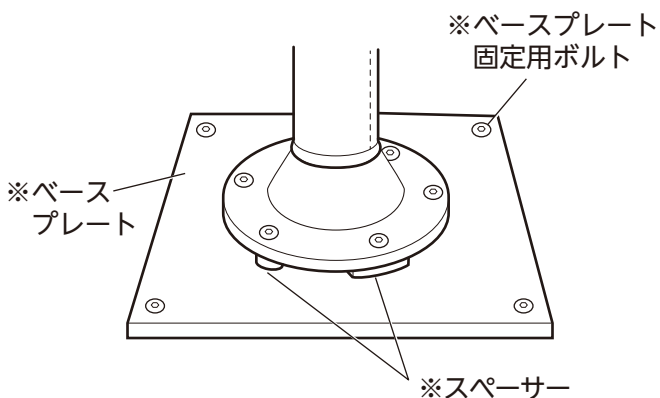


- 穴開けは車種により位置が異なります。
- M10サイズ以上のボルトを通すのに適した穴開けを行ってください。
- 地面に対して支柱が垂直になるようにスペーサーで調整してください。
- 支柱に傾きがあると、リフト使用時に回転部が意図しない動きをしたり、重くなる場合があります。

※支柱、アーム・モーターセット、コントローラーに貼付のバーコードは剥がさないようにしてください。(製品管理の為)


2. ハンガーの組立てとアームへの取付け

1

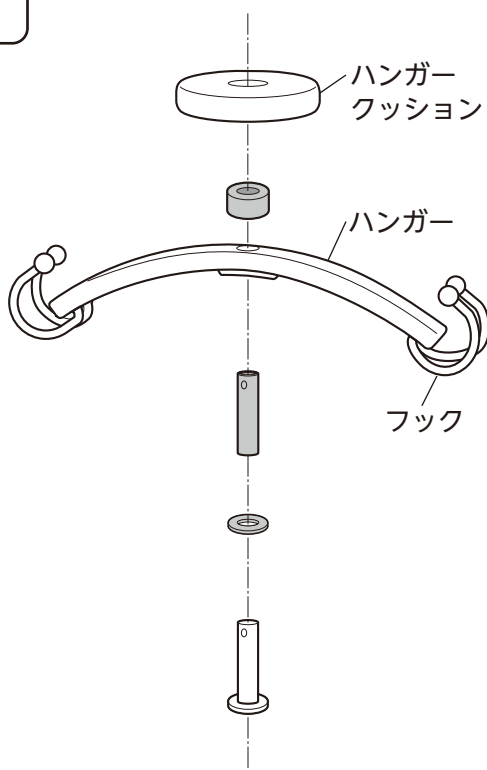


1. 図のように下から順番にはめてください。

2




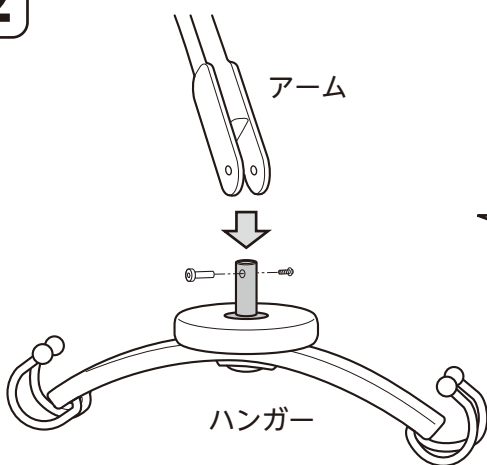


2. アームとハンガーを、ボルトでしっかり固定してください。

完成図

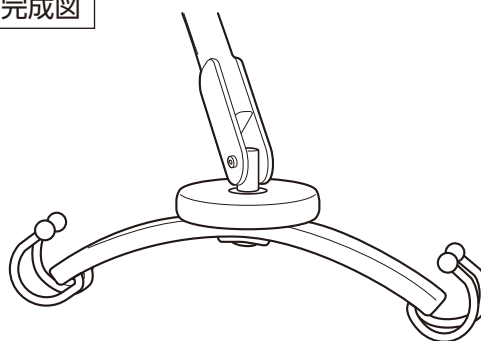

3. アーム・モーターセットの取付けと電源の接続

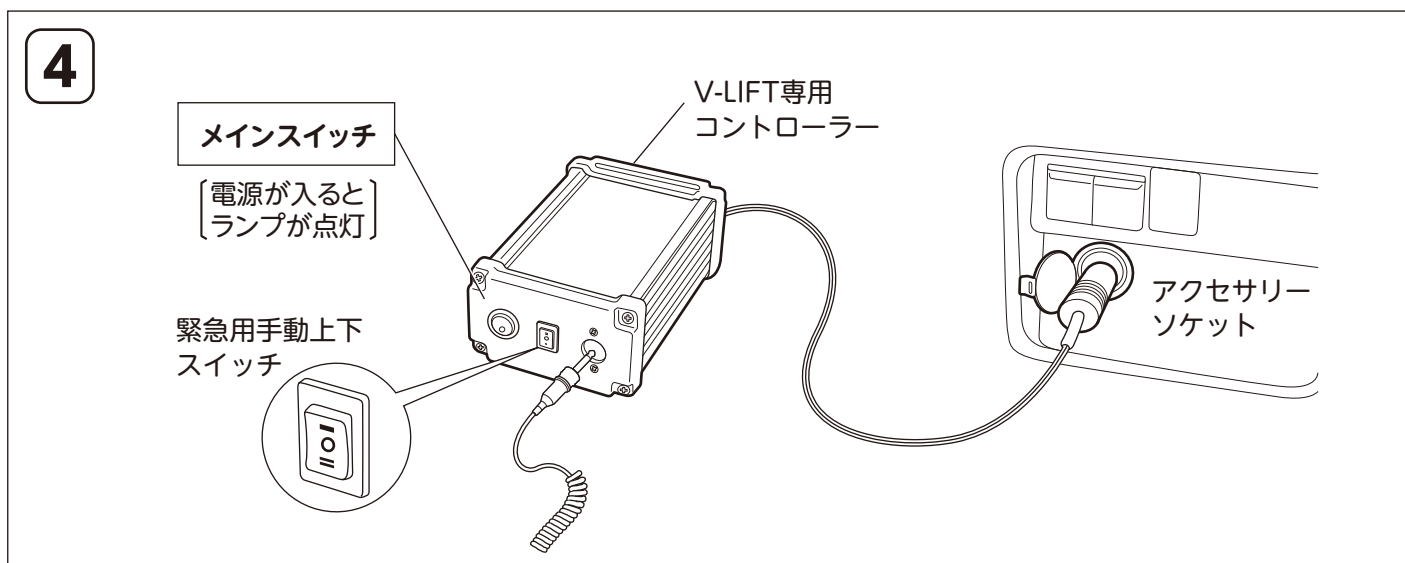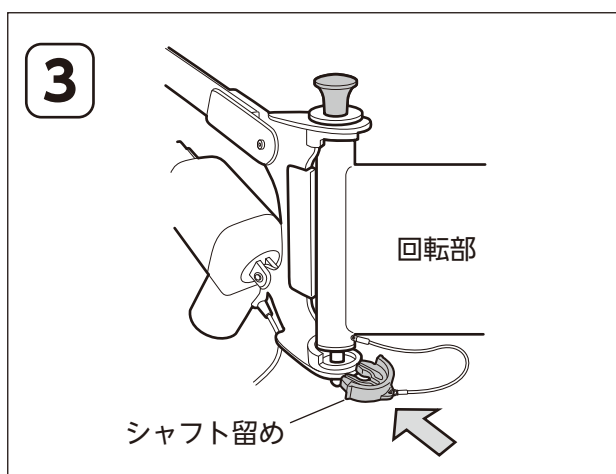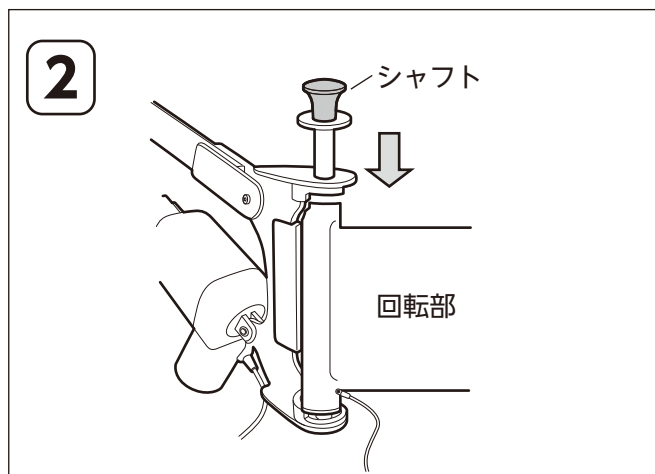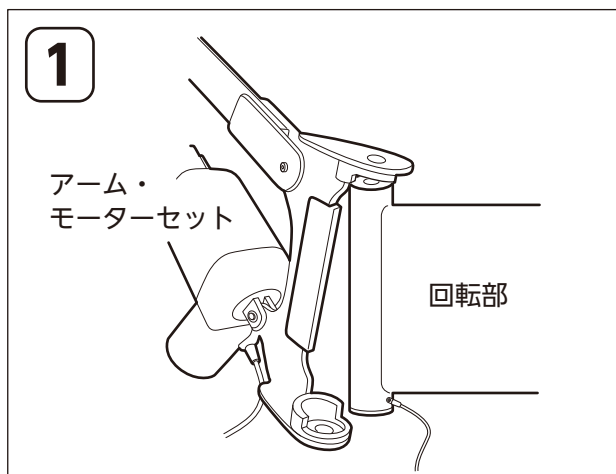

施工後点検

- 車両のエンジンをアイドリング状態で使用してください。(バッテリー上がり防止の為)
- 施工後の荷重テストは、はじめから100kgの重さをかけず、徐々に重さを増やしてください。
- 荷重をかけたとき、ボルト等に浮きやゆがみがないか確認してください。

V-LIFT操作方法

- 動画にてご確認ください。(YouTube限定公開動画)

つるべV-LIFT取付 & 操作動画

<https://m.youtube.com/watch?v=He-JBzXsCB4&feature=youtu.be>




⚠ 注意 | V-LIFT操作時に特に注意すること

- 取付け店は、V-LIFT操作方法動画を確認してお客さまに説明してください。
- リフトの使用は、車両を可能な限り水平な場所で行ってください。
- 車両のエンジンをアイドリング状態で使用してください。(バッテリー上がり防止)
- スリングの使用方法は、必ずお客さまに説明してください。
- お客さまに、スリングのひもがハンガーのフックに確実にかかっていることを、確認するように指示してください。
- リフトを使用しない時は、アームモーターセットを外し、保護カバーを装着してください。
- 走行時は、回転部が動かないよう支柱の回転部固定ねじを締め、保護カバーを装着し固定ベルトで座席と固定してください。(固定位置は車両により異なります)
- お客さまの身体状況に合わせ、スリングシートを選定してください。
- リフトの取付け位置は、お客さまと十分に打ち合わせをして決定してください。

V-LIFT スペック

品 名	入力電源	防水機能	定 格	備 考
モーター	24V	IP×6	10%	10,000N / 最大電源 7.7A
コントローラー	12V	—	10&	アクセサリースocket給電
ワイヤレススイッチ	—	—	—	ボタン電池サイズ CR2016×2 個

寸法・リフトストローク図

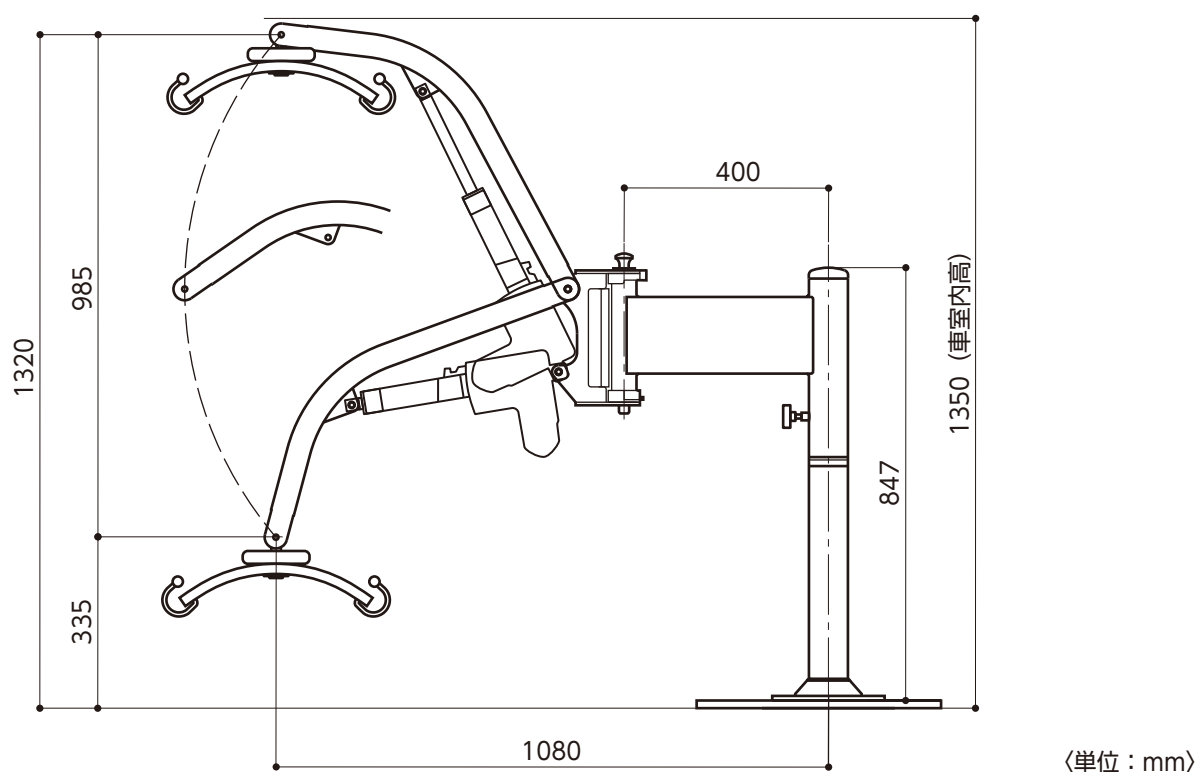

取付けに関するお問い合わせ

製品に関するお問い合わせ

製造元 **株式会社 モリトー**

お客さま相談室 ☎0120-65-2525

<http://www.moritoh.co.jp/>

E-mail : info@moritoh.co.jp

〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

Fax. 0586-72-4555

受付時間 9:00～17:00 (各週土曜、日曜、祝日定休)