



移座えもんグローブの使い方

介助をする前にご本人様に声をかけてから介助しましょう


横移動 (奥へ)

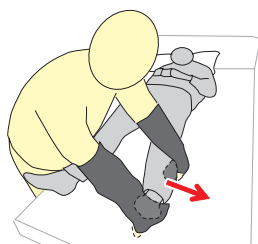


かかとの下に手を入れ、脚部を
(進行方向へ)滑らせます

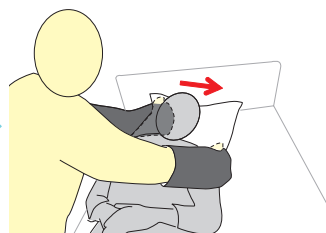


移動したい方向へ視線を向けま
す。又はマクラごと頭を少し傾
けます。

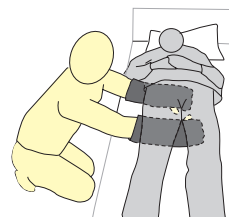


手の甲を上にし仙骨部に入れま
す。

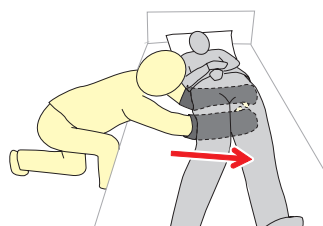


体全体で進行方向へ滑らせま
す。

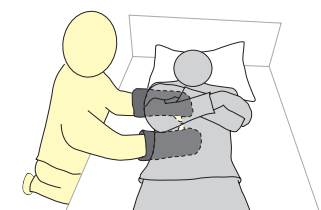

手の甲を上にし肩甲骨周辺に入
れます。

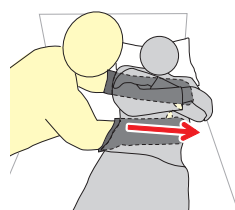


体全体で進行方向へ滑らせま
す。

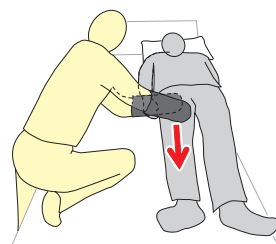


移動後、姿勢・衣服(シワ伸ばし
等)を整えます。


横移動 (手前へ)

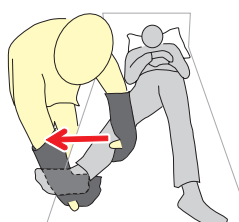


かかとの下に手を入れ、脚部を
(進行方向へ)滑らせます。

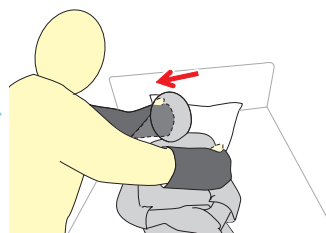


移動したい方向へ視線を向けま
す。又はマクラごと頭を少し傾
けます。

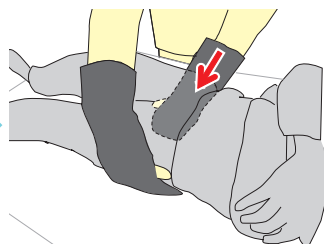


手のひらを上にし仙骨部に差
し込みます。(反対側の手で骨
盤をサポートすると差し込みや
すくなります)

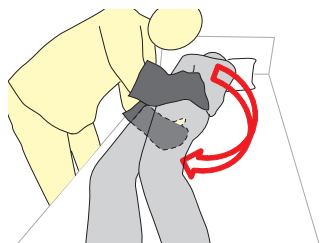


仙骨部を乗せた前腕を引き寄せ
ながら、御本人の体を仰臥位に
します。

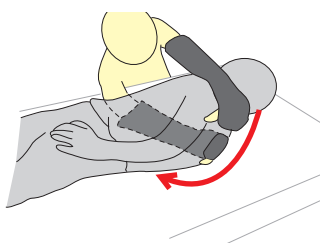

手のひらを上にし、肩甲骨まで
差し込みます。(反対側の手
で肩をサポートすると差し込み
やすくなります)

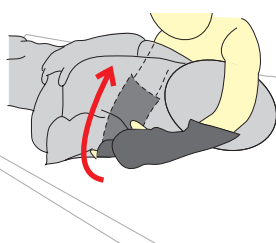

肩甲骨を乗せた前腕を引き寄せ
ながら、御本人の体を仰臥位に
します。

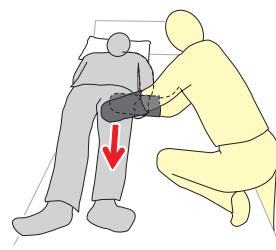

移動後、姿勢・衣服(シワ伸ばし
等)を整えます。

※ご本人様の体調や身体機能に合わせて滑らせる距離をご考慮下さい。



漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。
乾燥機やアイロンは使用しないでください。
ドライクリーニングはご遠慮ください。

ご使用にあたって

- 本製品は、移動介護等に使用する物であり本来の目的以外には 使用しないでください。
- 装着した際に体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合がございます。異常を感じたらご使用をおやめください。
- 滑りやすい生地を使用しているため、ベッド、床などに放置しないようにしてください。転落・転倒を招くおそれがあり、事故の原因にもなります。
- 無理に引張ったり、尖ったものを引っ掛けると破れる可能性があります。
- 薬品や溶剤によっては変質及び変形する場合がございますので、ご確認の上ご使用ください。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿な場所での保管は避けてください。

お手入れ方法

- 汗などで濡れた場合は裏返し、乾いた布などで拭き取り、日陰干しにしてください。濡れたままにしておくと、カビや臭いの原因となります。
- 消毒には弊社商品じょきん娘を推奨いたします。(詳細はモリトーホームページにて)