



# 移座えもんグローブ

〈介助用グローブ〉

グローブの中で指が分かれていますのでホールド感があります。

サイドスリットを設けた事によりムレ防止にも効果を発揮します。


ベッド上の  
移動介助時に

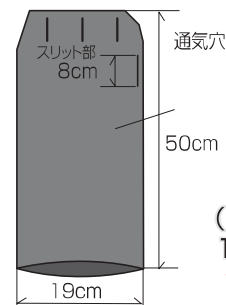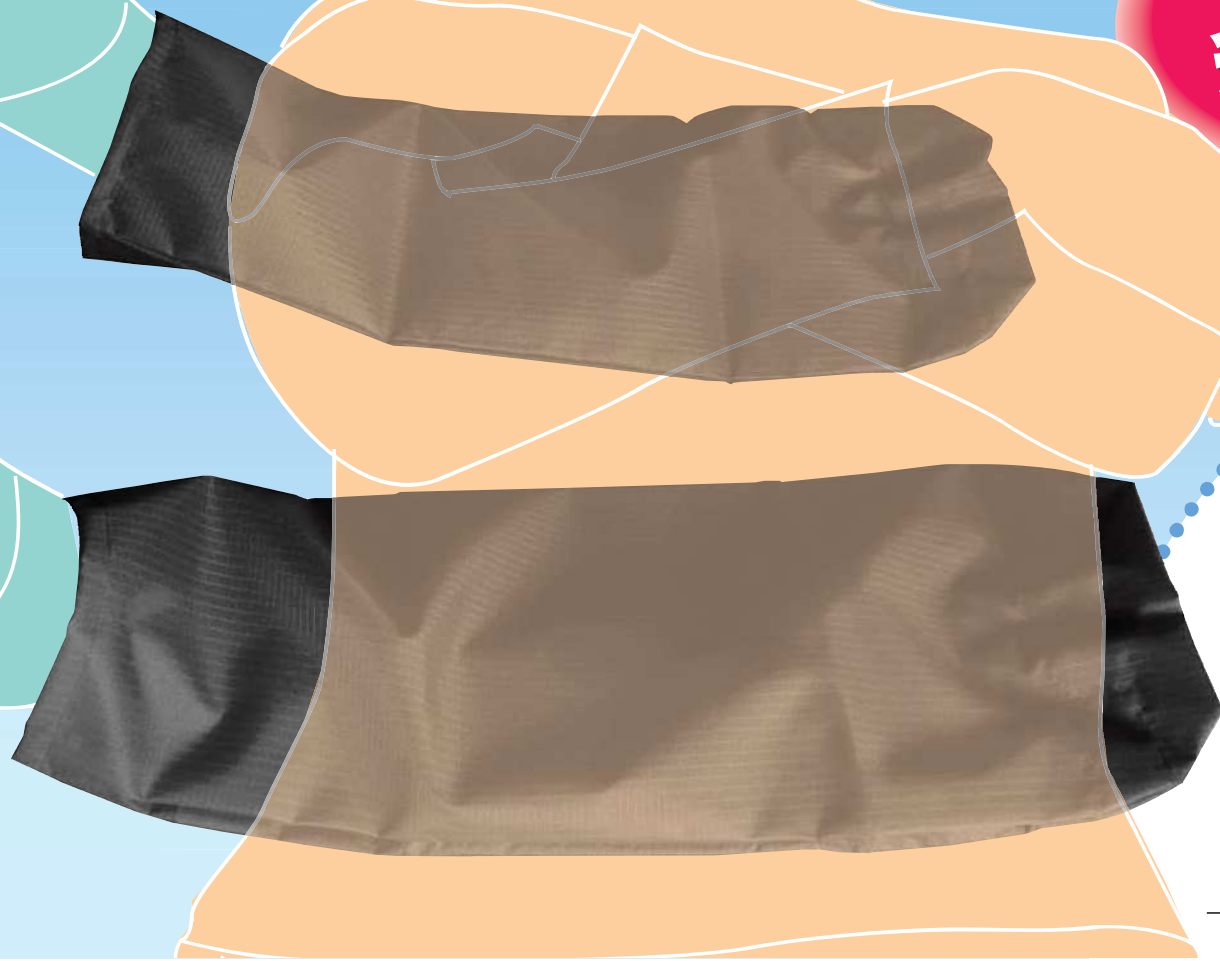

(1セット2枚入)  
19×50cm  
¥2,200  
・材質：ナイロン

韓国製

## 装着方法

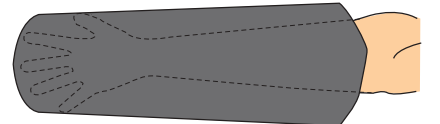

移座えもんグローブの内側の指先部分は4つに分かれていますのでそれぞれの指を挿入してください。グローブにはサイドスリットがあり、親指をグローブから出して使用する事も可能です。このスリットはムレ防止の為にも効果を発揮します。

## ■ 移座えもんボードブルー


ポリプロピレン製

移座えもんボード「介護の技術を変えよう」付価格  
61.8×29cm

¥17,600



## ■ 移座えもんシートBLACK

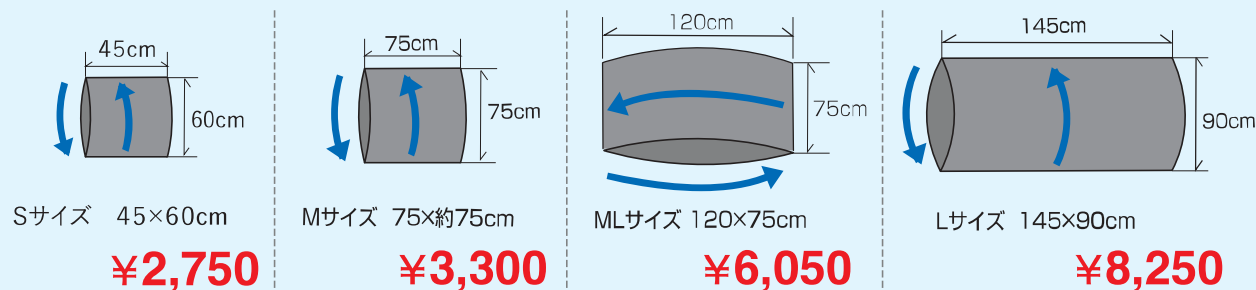

## ■ じょきん娘 (JOKINKO) (除菌・防カビスプレー)

成分:  
メルカプトビリジジオキシド系  
複合抗菌剤  
300ml



【製造発売元】

MORITOH CORPORATION  
株式会社 **モリト**

[ホームページ]

<http://www.moritoh.co.jp>

お客様相談室

0120-65-2525

■ 本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

札幌営業所・仙台営業所・埼玉営業所 東京有明ヨール 中部営業所・大阪営業所・岡山営業所・福岡営業所 E/C/16/2



移座えもんグローブ




4 560260 160914


# 移座えもんグローブの使い方

介助をする前にご本人様に声をかけてから介助しましょう


## 横移動 (奥へ)

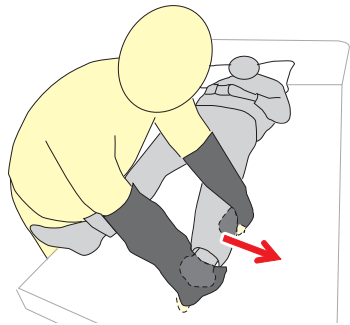


かかとの下に手を入れ、脚部を(進行方向へ)滑らせます

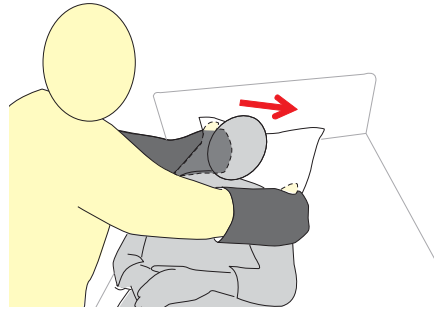


移動したい方向へ目線を向けます。又はマクラごと頭を少し傾けます。

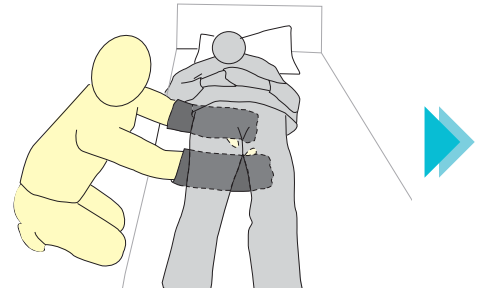


手の甲を上にし仙骨部に入れます。

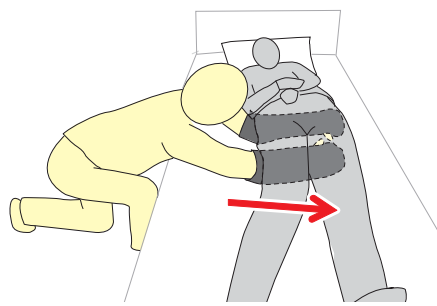


体全体で進行方向へ滑らせます。

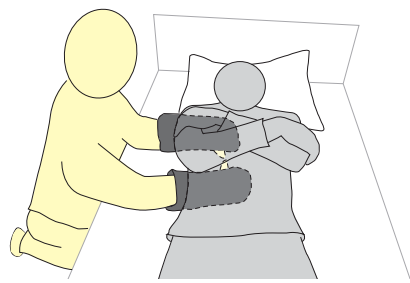

手の甲を上にし肩甲骨周辺に入れます。

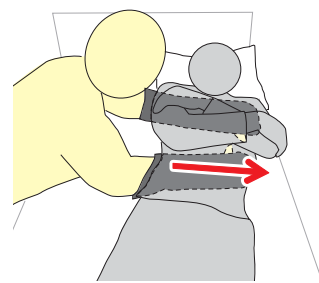


体全体で進行方向へ滑らせます。

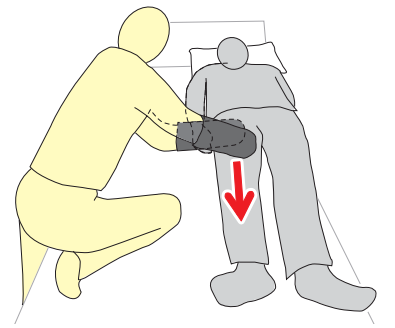


移動後、姿勢・衣服(シワ伸ばし等)を整えます。


## 横移動 (手前へ)

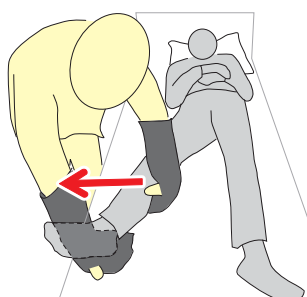


かかとの下に手を入れ、脚部を(進行方向へ)滑らせます。

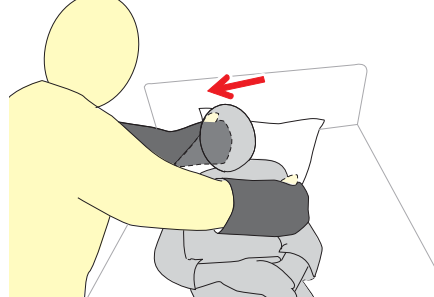


移動したい方向へ目線を向けます。又はマクラごと頭を少し傾けます。

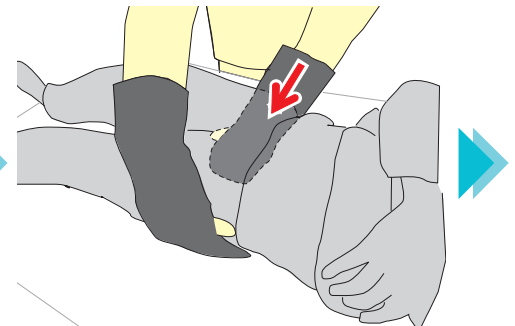


手のひらを上にし仙骨部に差し込みます。(反対側の手で骨盤をサポートすると差し込みやすくなります)

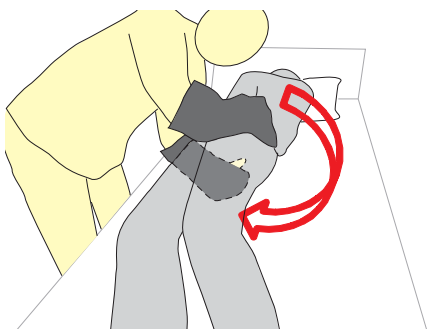


仙骨部を乗せた前腕を引き寄せながら、御本人の体を仰臥位にします。

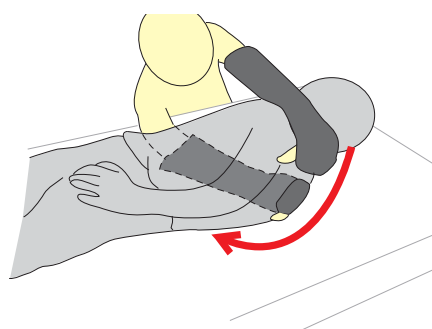

手のひらを上にし、肩甲骨まで差し込みます。(反対側の手で肩をサポートすると差し込みやすくなります)

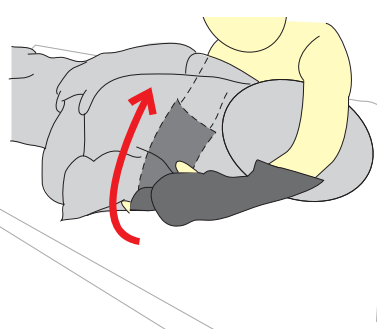

肩甲骨を乗せた前腕を引き寄せながら、御本人の体を仰臥位にします。

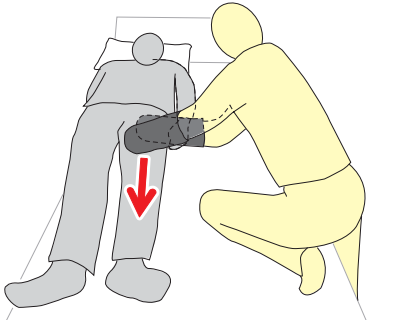

移動後、姿勢・衣服(シワ伸ばし等)を整えます。



漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。  
乾燥機やアイロンは使用しないでください。  
ドライクリーニングはご遠慮ください。

※ご本人様の体調や身体機能に合わせて滑らせる距離をご考慮下さい。

### ご使用にあたって

- 本製品は、移動介護等に使用する物であり本来の目的以外には 使用しないでください。
- 装着した際に体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合がございます。異常を感じたらご使用をおやめください。
- 滑りやすい生地を使用しているため、ベッド、床などに放置しないようにしてください。転落・転倒を招くおそれがあり、事故の原因にもなります。
- 無理に引張ったり、尖ったものを引っ掛けると破れる可能性があります。
- 薬品や溶剤によっては変質及び変形する場合がございますので、ご確認の上ご使用ください。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿な場所での保管は避けてください。

### お手入れ方法

- 汗などで濡れた場合は裏返し、乾いた布などで拭き取り、日陰干しにしてください。濡れたままにしておくと、カビや臭いの原因となります。
- 消毒には弊社商品じよきん娘を推奨いたします。(詳細はモリトールホームページにて)