

移座えもんシート

スライディングシート

BLACK



枕の下からシートを差し込み、肩甲骨の下部まで挿入します。

● 注意 ●

特に柔らかいマットレスでのご使用は、移動時の負担が大きくなることがあります。
移座えもんパット、移座えもんボードの併用をお勧めします。

※写真は移座えもんシートREDを使用しています。

ご本人の力を利用して頭側へ移動



ご本人の力で、腰を持ち上げ、足を突っ張ることで、頭方向に移動します。(足底が滑らないように滑り止めのシートを敷くと便利です。)



脚力が少し弱くなった方には、ご本人の力を利用しながら臀部を軽く持ち上げ、頭方向に押しで移動します。



ご自身で、足を突っ張ることが出来なくなってきた方には、移座えもんベルトを使用します。ベルトは、坐骨に掛け、腕を伸ばして、引いてください。



特に体重の重い方や、マットが柔らかい時には、腰の部分にもう1枚シートを敷き、移座えもんベルトを使用してください。

敷きこみ方のコツ



腕を深く組んで、背中を丸くすると、シートが挿入しやすくなります。



肩甲骨下部まで挿入できない時は、軽く肩を持ち上げ片側ずつ挿入してください。

引き抜き方



枕や体を支えながらシート下側を引いてください。特に、体重負荷の少ないところから引き抜くと引き抜きやすくなります。

横への移動と体位変換



介護者の反対側に体位変換します。シートを体の下にしっかり挿入します。



体を元に戻し、肩と腰を支えながら横移動させ、引き寄せます。




バスタオルを使用する場合は、タオルの下にシートを敷き、タオルを引けば容易に横移動できます。




バスタオルを使用して、斜め上方向にゆっくり引き上げると、そのままの場所で寝返りをすることができます。

移座えもんシートBLACK

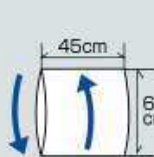


Sサイズ
45×60cm
(両端縫製仕上)

価格 2,750円

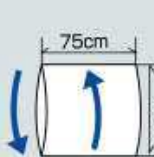

Mサイズ
75×75cm
(両端縫製仕上)

価格 3,300円

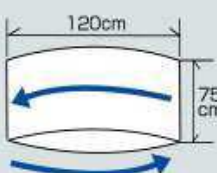

MLサイズ
120×75cm
(両端縫製仕上)

価格 6,050円



Lサイズ 145×90cm
(両端縫製仕上)

価格 8,250円



警告

本製品はベッド・寝具の上での体位変換・移動時に使用し、それ以外の用途には使用しないで下さい。また、人体以外には使用しないで下さい。火気厳禁。



注意

本製品は滑りやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。通路・床・お子様の手の届く場所に放置しないで下さい。誤って踏んだ場合、滑って転倒したりケガをする恐れがあります。



漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。乾燥機やアイロンは使用しないでください。ドライクリーニングはご遠慮ください。

オススメ!

福祉用具の防カビ・除菌用

■ じょきん娘 (JOKINKO) (除菌・防カビスプレー)

成分: メルカプトピリジンオキシド系 複合抗菌剤

300ml

