

移座えもんシート

スライディングシート
BLACK



枕の下からシートを差し込み、
肩甲骨の下部まで挿入します。

● 注 意 ●

特に柔らかいマットレス
でのご使用は、移動時の
負担が大きくなること
があります。
移座えもんパット、移座
えもんボードの併用をお
勧めします。

※写真は移座えもんシートREDを使用しています。

ご本人の力を利用して頭側へ移動

頭側



ご本人の力で、腰を持ち上げ、
足を突っ張ることで、頭方向に
移動します。（足底が滑らない
ように滑り止めのシートを敷く
と便利です。）



脚力が少し弱くなった方には、
ご本人の力を利用しながら臀部
を軽く持ち上げ、頭方向に押し
て移動します。



ご自身で、足を突っ張ることが
出来なくなってきた方には、移
座えもんベルトを使用します。
ベルトは、坐骨に掛け、腕を伸
ばして、引いてください。



特に体重の重い方や、マットが
柔らかい時には、腰の部分にも
う1枚シートを敷き、移座えも
んベルトを使用してください。

敷きこみ方のコツ



腕を深く組んで、背中を丸くすると、
シートが挿入しやすくなります。



肩胛骨下部まで挿入できない時
は、軽く肩を持ち上げ片側ずつ
挿入してください。

引き抜き方



枕や体を支えながらシート下側
を引いてください。特に、体重
負荷の少ないところから引き抜
くと引き抜きやすくなります。

横への移動と体位変換

頭側



介護者の反対側に体位変換しま
す。シートを体の下にしっかり
挿入します。



体を元に戻し、肩と腰を支えな
がら横移動させ、引き寄せます。



バスタオルを使用する場合は、
タオルの下にシートを敷き、タ
オルを引けば容易に横移動で
きます。



バスタオルを使用して、斜め上
方向にゆっくり引き上げると、
そのままの場所で寝返りをする
ことができます。


移座えもんシートBLACK



Sサイズ
45×60cm
(両端縫製仕上)
価格 **2,750円**



Mサイズ
75×75cm
(両端縫製仕上)
価格 **3,300円**

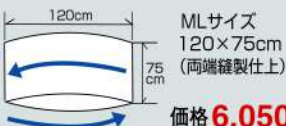

MLサイズ
120×75cm
(両端縫製仕上)
価格 **6,050円**



Lサイズ 145×90cm
(両端縫製仕上)
価格 **8,250円**



警告

本製品はベッド・寝具の上での体
位変換・移動時に使用し、それ以
外の用途には使用しないで下さい。
また、人体以外には使用しないで
下さい。火気厳禁。



注意

本製品は滑りやすいので、取り扱
いには十分ご注意ください。通路・床
・お子様の手の届く場所に放置しな
いで下さい。誤って踏んだ場合、
滑って転倒したりケガをする恐れ
があります。



漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。
乾燥機やアイロンは使用しないでください。
ドライクリーニングはご遠慮ください。

オススメ!

福祉用具の防カビ・除菌用

■ じょきん娘
(JOKINKO)
(除菌・防カビスプレー)

成分:
メルカプトピリジノキシド系
複合抗菌剤

300ml.....
¥2,640

