

効果バツグン!

除菌・防臭・抗菌・防カビ

この機会に
比べてください!

24時間
持続

即効
1分

真菌・細菌
600種
以上に効果

ノロ
ウイルス
に効果

福祉用具などの防カビ・除菌に

じょきん娘

〈JOKINKO〉
ハndsプレー



じょきん娘 (300ml)
..... ¥2,640

〈じょきん娘は生地や金属類を劣化させません〉

介護リフト用吊具(スリングシート)の洗浄・消毒は、漂白剤・塩素系洗剤の使用は厳禁です。

『じょきん娘』の使い方

使い方は、直接噴霧するほか、ヘルパーさんや、訪問看護師さんの場合では、チャック付のビニール袋に移座えもんシートやグローブを無造作に入れて、「じょきん娘」を袋内に噴霧し、チャックを閉じることで、約1分で除菌ができます。
次の訪問先に行く途中で、的確な除菌ができます。



じょきん娘の噴霧(実例)

- ① チャック付のビニール袋に入れて噴霧
- ② 1分程度で除菌

少量で効果があり、作業時間が短縮できます

真菌・細菌
600種
以上に効果

24時間
持続

即効
1分


ノロ
ウイルス
に効果

『じょきん娘』の有用性

「じょきん娘」の主成分はメルカプトピリジンオキシド系複合抗菌剤+高純度亜塩素酸ナトリウムで、複合合成剤であるため、ひとつの薬剤に対して耐性を獲得しても、他の薬剤が効果を発揮します。複合合成された全ての薬剤に対して耐性を獲得する可能性はほとんどありません。医療・福祉の現場で、最も必要な機能を備えています。安全な福祉用具利用のもう一つの側面です。

●『じょきん娘』の効果比較

シャワーキャリーの座面比較

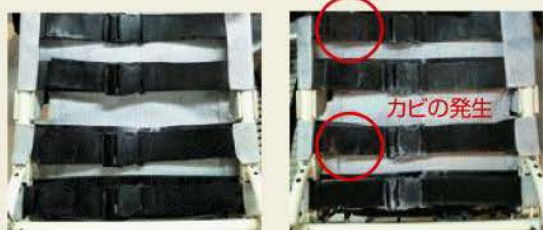

左はじょきん娘使用、右は使用しない。

シャワーキャリーのフットベルト比較



左はじょきん娘使用、右は使用しない。

●他の製品との比較

じょきん娘と他の薬剤の総合比較			
	じょきん娘	次亜塩素酸ナトリウム	エタノール
臭い	無臭	強い塩素臭	アルコール臭
腐食性	金属への腐食および樹脂・ゴム等を変質させるおそれはほとんど無い	金属への腐食および樹脂・ゴム等を変質させるおそれがある	金属への腐食および樹脂・ゴム等を変質させるおそれがある
有機物汚染状態の効果	○	×	△
耐性菌	出来にくい	出来やすい	出来やすい
漂白作用	なし	ある	ほとんどなし
トリハロメタン(発ガン物質)	生成しない	生成する	生成しない
防カビ効果	○	×	×
安全性	毒性が低く安全	毒性が高く、使用法を誤ると有毒ガスが発生する	まれにアレルギー反応が出る
使用環境	密閉した環境等ほとんどの場所で使用出来る	密閉した環境では使用出来ない 使用箇所が限定される	密閉した環境では使用出来ない 使用箇所が限定される
その他	防臭効果がある	消臭効果はない	消臭効果はない 希釈すると殺菌力が著しく低下する
一般細菌	○	○	○
MRSA	○	○	○
緑膿菌	○	○	○
結核菌	○	△	○
真菌	○	○	○
芽胞菌	○	△	×
胞子状細菌	○	×	○
エイズウイルス	○	○	○
B型肝炎ウイルス	○	×	×

○：有効 △：効果が得られないことがある ×：無効

発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリト



0120-65-2525

【ホームページ】 <http://www.moritoh.co.jp>

【E-mail】 info@moritoh.co.jp

■本社/愛知県一宮市東島町3-36 TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

■営業所/札幌/仙台/埼玉/東京/中部/大阪/岡山/福岡

