

作成日 2012年8月27日

車いす用ツルベルトをお使いのお客様へ



安・栄・清
MORITOH CORPORATION
株式会社

モリトー

代表取締役 森島勝美
〒491-0074 愛知県一宮市東島町3丁目36番地
TEL 0586-71-6151 (代表)
FAX 0586-72-4555

注 意 喚 起

平素は、株式会社モリトーの製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
弊社の製造しております、「車いす用ツルベルト」を安全にご使用いただくために、以下の内容に注意し、ご利用いただきますよう、よろしくお願いたします。
注意事項を順守し、安全にご利用いただかない場合、落下事故等、身体に重大な障害を負う又は、死亡事故につながる危険があります。
ご使用前には、安全点検を行い、注意してご利用ください。

使用前の安全点検の確認 (定期点検のお願い)

I. 使用前の確認項目

1. ベルトのバランス(前後・左右/長さ確認)

- 1-1. 車いす用ツルベルトは足側2本と頭(背シート)側2本の計4本の組み合わせです。
左右のベルトの長さが同じであることを定期的に確認してください。
- 1-2. 車いすにだれも乗っていない状態で吊上げ、車いすの座面の前座高が後座高より5cm以上高くなるようにベルトの長さを調整してください。

2. 車いす用ツルベルト及びアジャスターの劣化の確認

- 2-1. ベルト部の摩耗(ホツレなどの破損がないことを定期的に確認してください。)
- 2-2. 樹脂製アジャスターの破損(割れ等の破損がないことを定期的に確認してください。)
アジャスターは、車いす用ツルベルトの長さを調節する金属製アジャスター(1個)と長さを固定する樹脂製アジャスター(1個もしくは2個)があります。(図1-① 図1-②参照)

※各部で破損や摩耗が発見されたときは、使用を停止してください。破損した部品を使用されま
すと、重大な事故につながる危険性があります。

※破損や摩耗等が発見された場合は、お求めになられた販売店までご連絡ください。

3. 黒輪の固定性(トライドンバンドの固定性、位置変化)確認

- 3-1. ベルト部の摩耗(ホツレなどの破損)がないことを定期的に確認してください。
- 3-2. 黒輪の位置が左右均等であることを確認してください。ズレている場合は、お求めいただいた販売店に調整依頼をしてください。

3-3. トライドンバンド(ステンレス製バンド)が緩い場合は、お求めいただいた販売店に調整依頼をしてください。ただし、一度取り外したトライドンバンドは再使用できません。

4. 車いす用ツルベルトの使用上の注意点

4-1. 車いす用ツルベルトを使用するときは、ツルベルト先端(上端)をリフトのハンガーに掛ける位置を確認し、正しく使用してください。(図2参照)

4-2. 車いす用ツルベルトを短くして使用する場合、4-1の注意とともに、ツルベルト先端を折り返して使用しないでください。(図3・4参照)

5. 車いす用ツルベルトを極短く使用する際の注意点(特記事項)

5-1. 車いす用ツルベルトを極短く使用する際には、ツルベルト先端(上端)の部分が2重になっております。ハンガーに掛ける位置を確認し、2重のベルトの間(外側のベルトのみ)に掛けないように注意して使用してください。(図5参照)

5-2. 車いす用ツルベルトを極短くして使用する場合にも、4-1の注意とともに、ツルベルト先端を折り返して使用しないでください。(図3・4参照)

II. 新製品のお知らせ

□旧来の車いす用ツルベルトの廃盤

車いす用ツルベルトセット(商品番号 800024001)、長さ調整機能付きについて、新規規格への変更に伴い、廃盤とさせていただきます。黒輪及びトライドンバンド部分については、新型とも互換性があるため、ツルベルト部の交換の際は、引き続きご利用いただけます。

□新型の車いす用ツルベルトのお知らせ

車いす用ツルベルトセット(商品番号 800024024)、ラダータイプを2012年8月より発売いたします。ベルトの左右のバランスの調整が不要なハシゴ段形状のツルベルトです。(図6参照)

□共通仕様と注意点

黒輪及びトライドンバンド部分については、新型とも互換性があります。ただし、経年劣化の可能性ありますので、上記点検の後、ご利用ください。また、安全にご利用いただくためにもセットでの交換をお勧めいたします。

□使用期限の新設

車いす用ツルベルトセット(商品番号 800024024)、ラダータイプは、お客様により安全にご利用いただくために、製品の使用期限を使用開始日から3年間とさせていただきます。

製品の使用開始時、「年 月 日」欄にご記入いただき、使用期限の確認をお願いいたします。


(図7参照)

適切な定期点検により、弊社製品を安全にご使用いただきますよう、お願い申し上げます。

参照資料図

車いす用ツルベルトセット(商品番号 800024001)
長さ調整機能付き

図1-① 樹脂製アジャスター2個タイプ

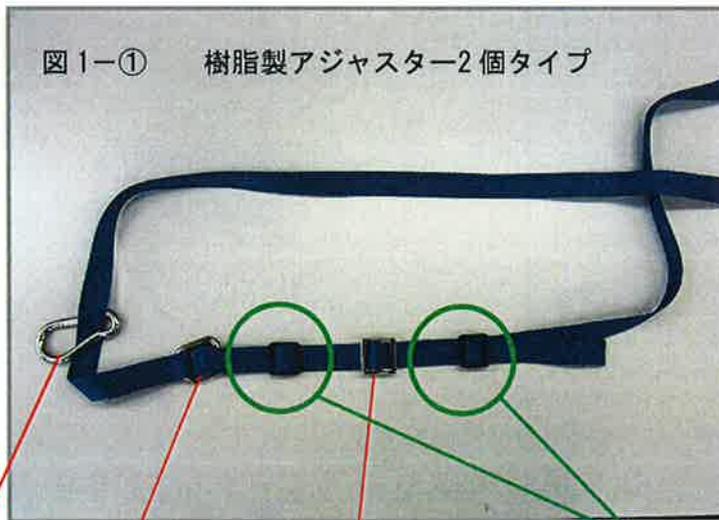


SUS カラビナ

SUS リング

金属アジャスター

樹脂アジャスター(2個)

図1-② 樹脂製アジャスター1個タイプ

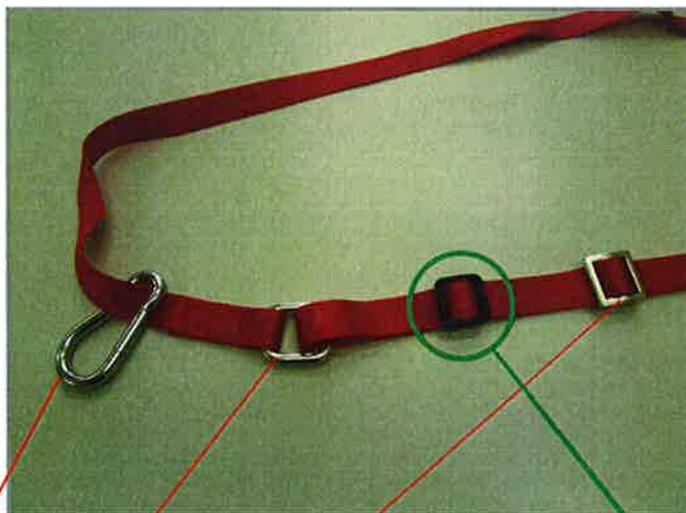

SUS カラビナ

SUS リング

金属アジャスター

樹脂アジャスター(1個)

使用上の注意点 ハンガーに掛ける位置を確認

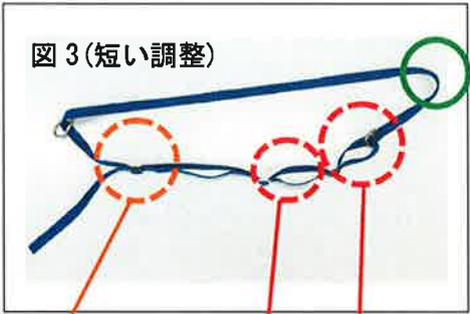


図4(注意事項)

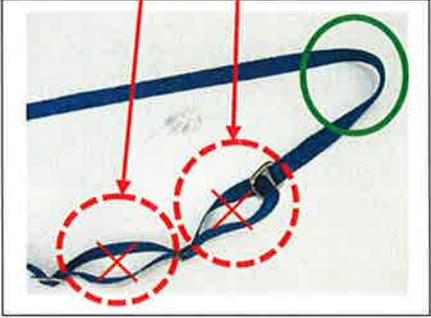


図5(特記事項) アジャスター1個タイプの車椅子用ツルベルトを極短く使用する場合



* 上記のようにリフトハンガー取付位置のベルトが2重になっている場合は、2本のベルトの間(外側ベルトのみ)にハンガーを掛けないように注意して下さい。適正な位置は2重のベルト内側をハンガーに掛ける状態です。

参照資料図

車いす用ツルベルトセット(商品番号 800024024)
ラダータイプ 新商品の紹介

図6

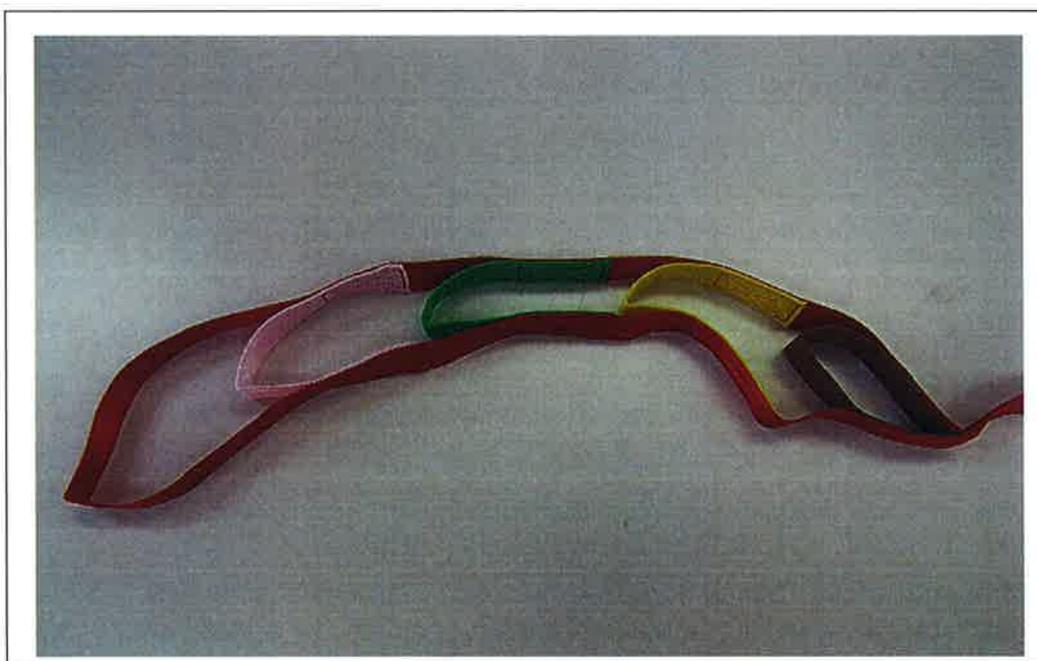


図7

