

お取引先各位

安・楽・満  
MORITOH CORPORATION  
株式会社 **モリト**  
代表取締役 森島勝美  
〒491-0074 愛知県一宮市東島町3丁目36番地  
TEL 0586-71-6151 (代表)  
FAX 0586-72-4555

### 楽匠Z専用脚座パッドの設置方法

1. 介護リフトつるべBセットのベースプレート（正方形の独立皿）を図1のように45°回転させます。（写真1） **回転させなくても設置可能です。**
2. 脚座パッドの上に楽匠Zの脚座を乗せます。（図2参照）
3. ナットが脚座パッドに干渉する場合、パッドの側面がカットされている面を角パイプ側にしてください。（図3）

図1


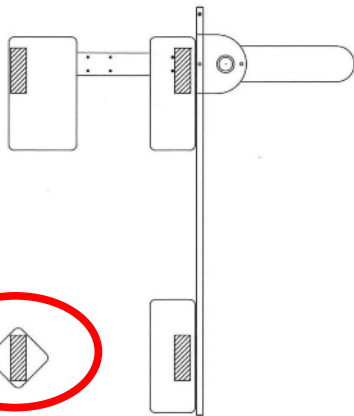


図2



図3

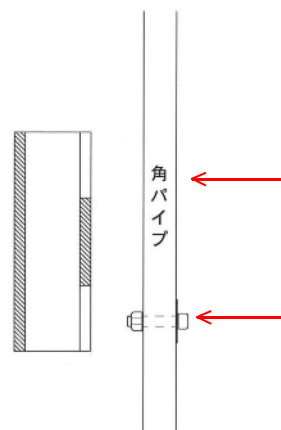

**外側から2つ目の穴で固定**

**仕様変更により  
斜めにしなくても  
設置可能です。**

写真1

