


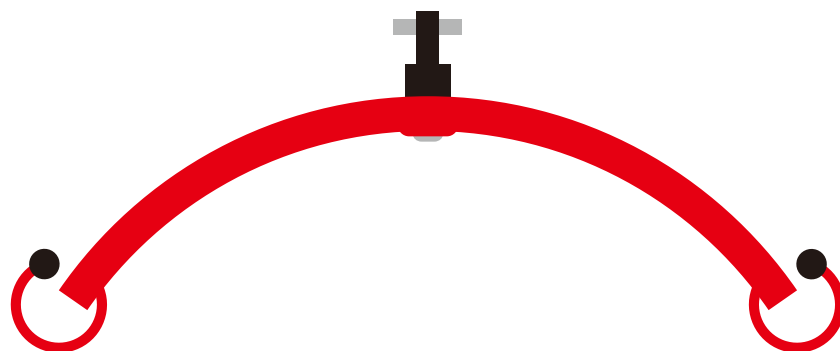

# NURSING LIFT

介護リフト

つるべー

TSURUBE

LINEUP



ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

## つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。

紹介動画



外観寸法



つるべー BBセット

### Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4カ所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

### BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻繁にベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をとったり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



BWセット・BBWセットは体重計付きです。



360度回転アーム  
置き場所で様々な使い方が可能になります。  
[Bセット]



関節付きアーム  
可動範囲が広がります。  
[BBセット]



つるべー Bセット



つるべー BBセット



### リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。

BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。

- 最小単位／100g
- 電源／アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENIにお付けできます。

検定付

リフト用デジタル体重計 MHS-2600〈検定付〉

¥220,000(税込)

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

## つるべー Y4・Y6セット

紹介動画



外観寸法



小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。



Y6セットLi-PINK

## Y6セット(6輪)の特徴


- 低床ベッドに対応した床走行式リフト。  
6輪自在キャスターによりその場での  
旋回が可能。狭いお部屋での  
取り回しが楽です。



つるべー Y6セット

## Y4セット(4輪)の特徴


- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)  
前輪キャスターを採用しているの、  
前進・後進がとてもスムーズ。  
軽く移動が行えます。

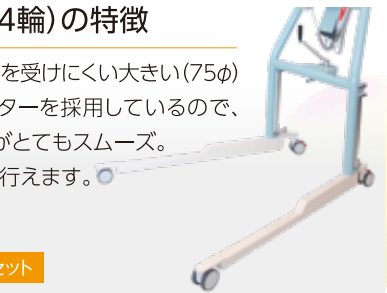

つるべー Y4セット

## Y4、Y6 セット専用手すり


- 手すりの高さの位置は  
4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の揺れを、  
手すりを握ることで軽減します。

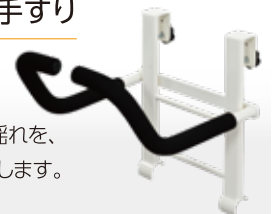

Y6TセットLi-PINK 手すり付

ハーネスライトを使った端座位姿勢からの立ち上がりと歩行支援

エヴァハーフ使用時

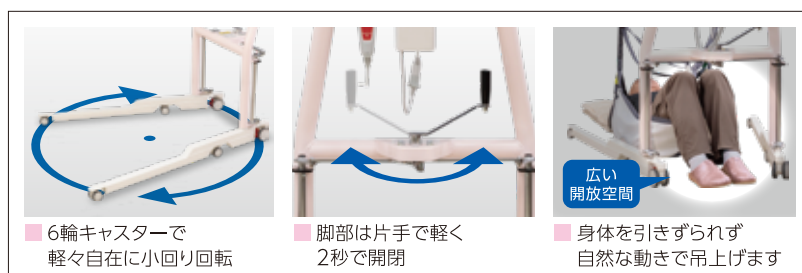

6輪キャスターで  
軽々自在に小回り回転

脚部は片手で軽く  
2秒で開閉

広い  
開放空間  
身体を引きずられず  
自然な動きで吊上げます

## Y4、Y6セット Li-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
  - バッテリー軽量化
  - 寿命UP
  - 充電忘れによる劣化が  
少ない
  - 充電時間が大幅短縮
  - 充電コードなしなど  
性能が大幅にアップ  
しました。



Y4W・Y6W・Y4TW・Y6TWセットは  
体重計付きです。



自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

## つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画



外観寸法



つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット


壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

### F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性もよく、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

### F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。

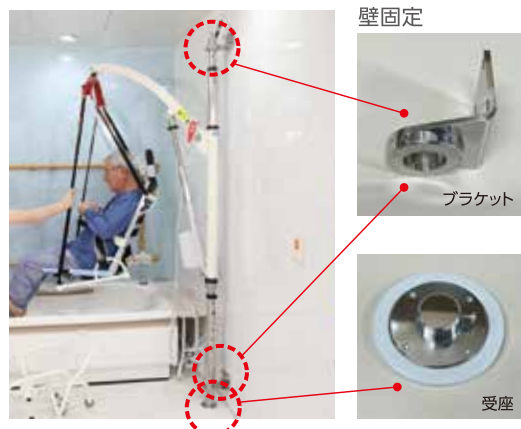

壁固定

ブラケット

受座

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定



コーナーブラケット



突っ張り棒

背面プレート



受座



介護リフト付きホーロー浴槽

## OCTBATH

置くだけのオクトバス／給排水工事不要※1／電源工事不要

紹介動画



外観寸法





※1 給湯、排水設備は必要です。 ※2 お湯を張った状態での耐荷重です。



## OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は一人でもOK。視線を合わせた優しい介助で会話が弾みます。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が付き、湯垢やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。

レイアウト図一例 4,000

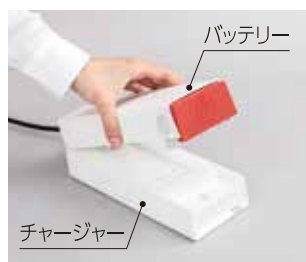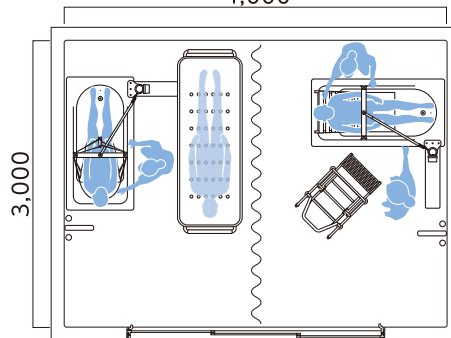

バッテリー

チャージャー



コントローラー

## リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で長寿命。性能は当社製品比較で2倍です。

## つるべSセット Swing Lift CoCoRo

壁に収納することでリフトの置き場の問題を解消し、お部屋の雰囲気を和らげます。

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 介護リフト つるべSセット<br>Swing Lift CoCoRo | ¥487,000<br>(非課税) |
| 支柱のみ                               | ¥113,700<br>(税込)  |

※価格には家具類、吊り具、取付工事費は含まれておりません。

本品は株式会社モリトーとグッドタイムリビング株式会社の共同開発製品です。

耐荷重  
100kg

つるべシリーズで最もコンパクトなリフト

# つるべー G1・G2Rセット U1・U2Rセット

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



つるべー G2Rセット

紹介動画



外観寸法



Gシリーズ



Uシリーズ

## G1セットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。

## G2Rセットの特徴

- G1セットに200mmの関節を追加したリフト。可動範囲が増え、曲がり階段の段差解消にも使用できます。

## U1セットの特徴

- 床面で固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。

## U2Rセットの特徴

- U1セットに関節(300mm・400mm)を追加したリフト。

## 車椅子用ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



つるべー G1セット



つるべー U1セット



車椅子用ツルベルトセット



▲ 車椅子用  
ツルベルトセット  
使用可能  
車椅子の条件



室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

## つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

## 設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

## 据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。  
据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がごございます。

スプリングハンガーを使用した  
SSシリーズも設置可能です。

据置式(2ポスト)



## C-450(手動走行)／C-625(電動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格 無線リモコンタイプもごございます。

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

## つるべー Cセット N-Lift / V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

紹介動画



つるべー Cセット V-Lift

## Cセットの特徴

- フルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー



つるべー Cセット N-Lift



N-Lift 着脱イメージ



N-Lift 収納イメージ

N-LiftはHONDAとの共同開発製品です。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

## スリング エヴァ／パオ

エヴァ  
紹介動画



パオ  
紹介動画



### エヴァ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。



### エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。



### エヴァ ネックサポート

エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的弱くなってきた場合に使用します。

### エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

|                     |                    |                            |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| エヴァハーフ 小 (EVE220)   | 目安身長: 135~150cmくらい | ¥42,900(税込) / ¥39,000(非課税) |
| エヴァハーフ 中 (EVE210)   | 目安身長: 150~190cmくらい | ¥42,900(税込) / ¥39,000(非課税) |
| エヴァフル 小 (EVE250)    | 目安身長: 135~150cmくらい | ¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税) |
| エヴァフル 中 (EVE240)    | 目安身長: 150~190cmくらい | ¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税) |
| エヴァネックサポート (EVE260) | 30×19.5cm          | ¥13,200(税込) / ¥12,000(非課税) |



### パオ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。



### パオ フル

比較的首の据わりの悪い方に使用します。

|                          |                 |                            |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| パオ ハーフ (PAO100) 70×100cm | 目安身長: ~180cmくらい | ¥47,300(税込) / ¥43,000(非課税) |
| パオ フル (PAO120) 70×130cm  | 目安身長: ~175cmくらい | ¥58,300(税込) / ¥53,000(非課税) |
| パオ ロング (PAO130) 70×150cm | 目安身長: ~190cmくらい | ¥61,600(税込) / ¥56,000(非課税) |

### パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

### パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



### パオメッシュブルー ハーフ



### パオメッシュブルー フル



### パオメッシュグレー フル

|                                 |                    |                            |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| パオメッシュブルー ハーフ (PAO140) 70×100cm | 目安身長: ~180cmくらい    | ¥42,900(税込) / ¥39,000(非課税) |
| パオメッシュブルー フル (PAO150) 70×140cm  | 目安身長: ~175cmくらい    | ¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税) |
| パオメッシュグレー フル 小 (PAO350)         | 目安身長: 135~150cmくらい | ¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税) |
| パオメッシュグレー フル 中 (PAO340)         | 目安身長: 150~190cmくらい | ¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税) |

### 休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用してご使用ください。

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 休足スリング (PAO160) 40×30cm | ¥19,800(税込) / ¥18,000(非課税) |
|-------------------------|----------------------------|



※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。



自立化支援と重度化防止を目的とした

## スリング ハーネス



## ハーネスハイブリッド

対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。

|            |                     |                              |
|------------|---------------------|------------------------------|
| HV-100(SS) | ウエストサイズ: 約55～65cm   | ¥63,800(税込)<br>／¥58,000(非課税) |
| HV-110(S)  | ウエストサイズ: 約65～75cm   |                              |
| HV-120(M)  | ウエストサイズ: 約75～90cm   |                              |
| HV-130(L)  | ウエストサイズ: 約90～100cm  |                              |
| HV-140(LL) | ウエストサイズ: 約100～110cm |                              |



## ハーネスライト

対象者:軽度～中度者向け

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。

|          |                     |                              |
|----------|---------------------|------------------------------|
| L-110(S) | 腸骨周りサイズ: 約72～86cm   | ¥50,600(税込)<br>／¥46,000(非課税) |
| L-120(M) | 腸骨周りサイズ: 約86～100cm  |                              |
| L-130(L) | 腸骨周りサイズ: 約100～114cm |                              |



## ハーネススーパーライト

対象者:軽度者向け

※POPOではご使用頂けません。

懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

|           |                    |                              |
|-----------|--------------------|------------------------------|
| SL-110(S) | ウエストサイズ: 約53～68cm  | ¥38,500(税込)<br>／¥35,000(非課税) |
| SL-120(M) | ウエストサイズ: 約68～88cm  |                              |
| SL-130(L) | ウエストサイズ: 約88～105cm |                              |



## ハーネスベスト(TSV)

※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発製品です。

体幹部分は、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

|          |             |
|----------|-------------|
| V-120(M) | ¥63,800(税込) |
| V-130(L) |             |

歩けるスリング

## ぶらん歩 四角／ぶらん歩 三角

紹介動画



ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

## ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。



ぶらん歩 四角




ぶらん歩 三角

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ぶらん歩 四角       | ¥47,300(税込)／¥43,000(非課税) |
| ぶらん歩 三角 S/M/L | ¥47,300(税込)／¥43,000(非課税) |

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

## 安楽キャリー

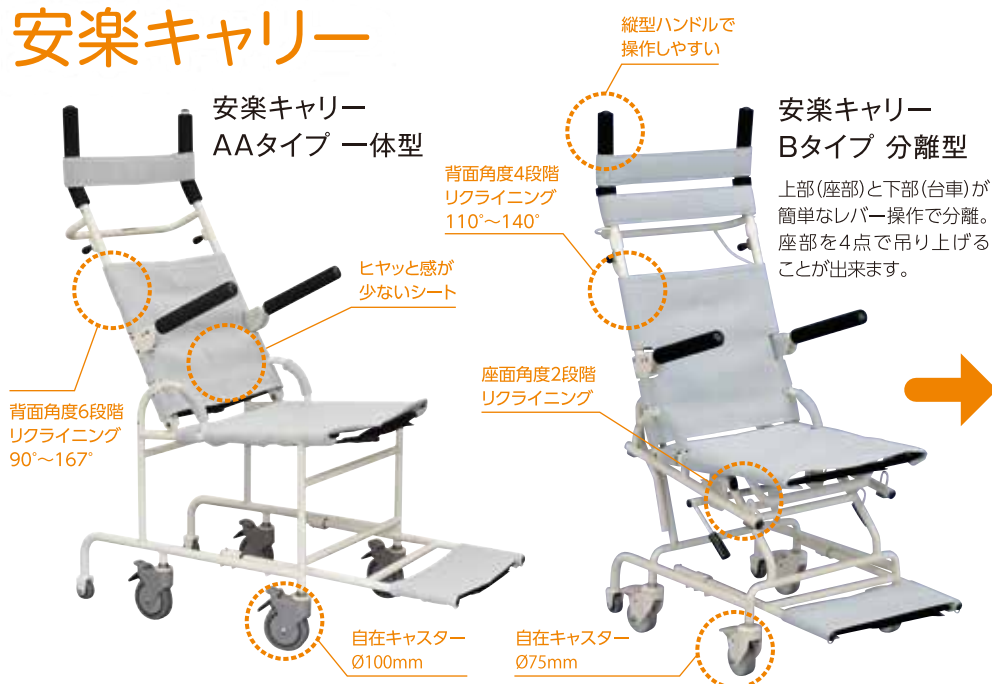

紹介動画



外観寸法




上部座部と下部台車が分離。リフトの吊り具として使用可能。※ツルベルトは同梱されます。

## 安楽キャリーの特徴

- シートの張りを変えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー（オプション）を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安心のフラット姿勢 (AAタイプ)

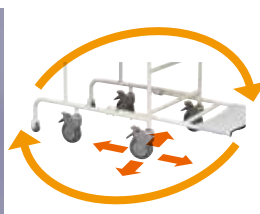補助ベルトの調整で  
洗髪姿勢が容易にとれます

自由に動けます

安楽キャリーBタイプ  
穴あき座面付

※穴あき座面付には、オプション  
延長バー（150mm/200mm）は  
使用できません。

## 延長バー使用時



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 安楽キャリーAAタイプ（一体型）      | ¥148,500（税込）               |
| 安楽キャリーBタイプ（分離型）       | ¥221,100（税込）／¥201,000（非課税） |
| 安楽キャリーBタイプ（分離型）穴あき座面付 | ¥233,750（税込）／¥212,500（非課税） |

※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。（オプションは課税です）

## 安楽キャリー共通専用オプション

安全ベルト（大：1100mm 小：960mm）

左右の体幹バランスの不安定な方は、  
安全ベルトを必ずご使用ください。  
¥4,290（税込）

補助ベルト（1本 AA/B用）

¥2,420（税込）

延長バー（2本組 150mm/200mm）

¥6,930（税込）※穴あき座面付は使用不可

ネックサポート（AA/B用）

¥6,270（税込）

シートカバー（AA/B用）


¥3,740（税込）

穴あき座面用  
背面シート（B用）

¥10,450（税込）

穴あき座面（B用）

¥20,350（税込）

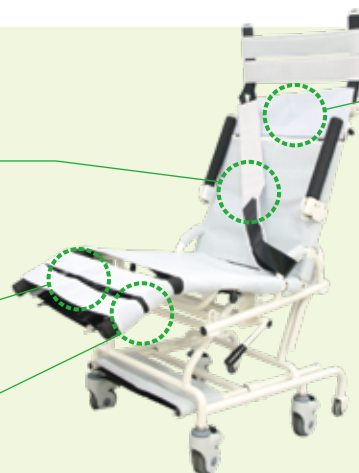




シートとボードとグローブで移動・移乗

## 移座えもん



移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたたみばポケットやハンドバックに入ります。

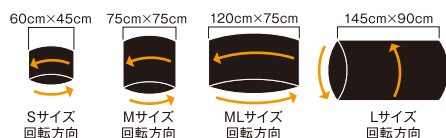

|             |          |             |
|-------------|----------|-------------|
| 移座えもんシート S  | 45×60cm  | ¥2,750 (税込) |
| 移座えもんシート M  | 75×75cm  | ¥3,300 (税込) |
| 移座えもんシート ML | 75×120cm | ¥6,050 (税込) |
| 移座えもんシート L  | 145×90cm | ¥8,250 (税込) |



移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗助にございます。

|              |                            |              |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 移座えもんローラ1800 | 180×50×1.6cm<br>折畳み寸法 90cm | ¥87,450 (税込) |
| 移座えもんローラ1000 | 100×50×1.6cm<br>折畳み寸法 50cm | ¥55,000 (税込) |



移座えもんグローブ

介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製

|                |         |             |
|----------------|---------|-------------|
| 移座えもんグローブ(2枚入) | 19×50cm | ¥2,200 (税込) |
|----------------|---------|-------------|

紹介動画



ヒップラインカット



ボード袋



上記使用方法的動画は付属のQRコードシールから閲覧ください。

移座えもんボードブルー

介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗助にございます。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 移座えもんボードブルー 61.8×29cm | ¥17,600 (税込) |
|-----------------------|--------------|

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

移座えもんボードホワイト

介護保険レンタル対象

移座えもんシートと  
移座えもんパッドを併用



- 1700gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は硬質塩化ビニール低発泡板で、食品衛生法「器具」として適合。
- 防災2級に適合しています。熱変形温度63度。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗助にございます。

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 移座えもんボードホワイト1000 45×100cm        | ¥19,800 (税込) |
| 移座えもんボードホワイト800 (脚部用ボード) 30×80cm | ¥9,900 (税込)  |

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 移座えもんパッド(延長ストラップ2本付) 50×100cm | ¥19,800 (税込) |
|-------------------------------|--------------|

移座えもんヒップベルト



- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

|             |              |
|-------------|--------------|
| 移座えもんヒップベルト | ¥13,200 (税込) |
|-------------|--------------|



除菌・防カビスプレー じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウィルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジジオキソド系複合抗菌剤です。

|       |             |
|-------|-------------|
| じょきん娘 | ¥2,640 (税込) |
|-------|-------------|



## モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

### ■ つるべー標準仕様

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 昇降速度 上昇(850mmアーム)         | 31.7mm/sec         |
| 昇降速度 下降(850mmアーム)         | 37.1mm/sec         |
| 耐荷重                       | 100kg              |
| 上下ストローク(700/850/950mmアーム) | 955/1160/1300mm    |
| ハンガーフック間距離(外寸法)*1         | 500(560)mm         |
| 材 質                       | スチール・ステンレス(SUS304) |

\*1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

### ■ つるべーY4・Y6セット仕様

|         |            |
|---------|------------|
| 昇降速度 上昇 | 36.3mm/sec |
| 昇降速度 下降 | 37.2mm/sec |
| 耐荷重     | 120kg      |
| 材 質     | スチール       |

### ■ オクトバス浴槽仕様

|      |       |                |
|------|-------|----------------|
| サイズ  | (外寸法) | 1400×700×550mm |
|      | (内寸法) | 1280×570×470mm |
| 容 量  |       | 満水265ℓ         |
| 本体重量 |       | 110kg          |

### ■ つるべー電装品仕様

| 品目              | 形式    | 入力電源  | 出力電源    | 重量     | コード長さ        | 防水性能 | 定格  | 備考            |
|-----------------|-------|-------|---------|--------|--------------|------|-----|---------------|
| モーター            | LA32  | 24V   | -       | 3.4kg  | 0.4mコイル      | IPX6 | 10% | 6000N/最大電流値6A |
| スイッチ            | HB31  | 24V   | -       | 0.26kg | 0.6mコイル      | IPX6 | -   | -             |
| コントローラー         | CB08  | 100V  | 24VDC   | 1.4kg  | 5.1mストレート    | IPX6 | 5%  | AC電源設定のみ      |
| コントローラー         | CB12  | 100V  | 24VDC   | 3.5kg  | 3.2mストレート    | IPX6 | 10% | バッテリー内蔵型      |
| Y4・Y6専用モーター     | LA34  | 24V   | -       | 4.2kg  | 0.4(0.2)mコイル | IPX6 | 10% | 10000N        |
| Y4・Y6専用コントローラー  | CBJ2  | 100V  | 24VDC   | 0.54kg | -            | IPX4 | 10% | バッテリー残量表示     |
| Y4・Y6専用バッテリーパック | BAJ1  | -     | 24VDC   | 2.7kg  | -            | IPX4 | -   | -             |
| Sセットモーター        | LA34  | 24V   | -       | 3.83kg | 0.4mコイル      | IPX6 | 10% | 10000N        |
| Sセットスイッチ        | HB31  | 24V   | -       | 0.26kg | 0.4mコイル      | IPX6 | -   | -             |
| Sセットコントローラー     | CB12  | 100V  | 24VDC   | 2.33kg | 3.2m         | IPX6 | 10% | -             |
| リチウムイオン電池       | BAL50 | 29.4V | 25.2VDC | 0.9kg  | -            | IPX6 | -   | -             |

### ■ オクトバス Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

| 品目      | 型 式   | 入力電源    | 出力電源    | 防水性能 | 備 考    |
|---------|-------|---------|---------|------|--------|
| モーター    | LA34  | 24V     | -       | IPX6 | 10000N |
| スイッチ    | HB31  | 24V     | -       | IPX6 |        |
| チャージャー  | CHL50 | 100V    | 29.4VDC | IPX4 |        |
| バッテリー   | BAL50 | 29.4V   | 25.2VDC | IPX6 |        |
| コントローラー | COL50 | 25.2VDC | 24VDC   | IPX6 |        |

### ■ つるべーCセット Nリフト電装品仕様

| 品目      | 入力電源 | 重量    | 防水性能 | 定格  | 備考           | バッテリータイプ                                        |                                                 |
|---------|------|-------|------|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| モーター    | 24V  | 3.4kg | IPX1 | 10% | 6000N/最大電源6A | (CB12)小型シール蓄電池<br>NP1.2-12, 12V, 1.2Ahを<br>2台使用 | (CBJ2)小型シール蓄電池<br>ES2.9-12, 12V, 2.9Ahを<br>2台使用 |
| コントローラー | 100V | 3.5kg | IPX6 | 10% | バッテリー内蔵型     |                                                 |                                                 |
| スイッチ    | 24V  | -     | -    | -   | -            |                                                 |                                                 |

### ■ つるべーCセット Nリフト仕様

|              |       |
|--------------|-------|
| 上下ストローク      | 525mm |
| 耐荷重          | 100kg |
| モーターアームセット重さ | 5.4kg |
| ボックスアーム重さ    | 4.5kg |
| 材 質          | アルミ   |

### ■ つるべーTEN仕様

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 走行方式         | C450 手動走行<br>C625 電動走行 |
| 本体重量         | 10kg                   |
| 積載重量         | 204kg                  |
| 昇降ストローク      | 2030mm                 |
| 走行速度         | 2・4・6・8m/分(電動走行)       |
| 昇降速度         | 45mm/秒                 |
| 動力電源         | DC24V(バッテリー搭載)         |
| 充電器入力        | AC100-120V 1.0A        |
| 充電器出力        | DC24V 1.5A             |
| 充電方法         | レールの端で自動充電             |
| バッテリー        | 12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池     |
| バッテリー残量表示    | 液晶/LED(赤)警告アラーム        |
| 操作方法         | 上下押し続けボタン方式            |
| ペンダントスイッチ    | 空気圧式                   |
| 赤外線リモコン      | ○                      |
| ストラップ緩み検知    | ○                      |
| 過速度検知        | ○                      |
| スロースタート・ストップ | ○                      |
| オートリターン機構    | ○                      |
| 節約モード        | ○                      |
| 乱巻き防止        | ○                      |
| 緊急降下装置       | ○<br>(電動と手動があり)        |
| 緊急停止装置       | ○                      |

●コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断

●コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動

●コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。  
1次側電源ヒューズ 2A

製造発売元



■本社 社/〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室  
[24時間受付]  
モリトーホームページ  
Email  
FAX (0586) 72-4555

☎ 0120-65-2525

http://www.moritoh.co.jp  
info@moritoh.co.jp



|                  |                               |                                       |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ■札幌営業所/〒063-0870 | 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101       | TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201 |
| ■仙台営業所/〒981-1102 | 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22             | TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555 |
| ■埼玉営業所/〒336-0025 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103        | TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649 |
| ■東京営業所/〒143-0025 | 東京都大田区南馬込4-16-3               | TEL (03) 3777-1648 FAX (03) 3777-1649 |
| ■中部営業所/〒491-0074 | 愛知県一宮市東島町3-36                 | TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555 |
| ■大阪営業所/〒577-0016 | 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンバクトオフィスB号 | TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203 |
| ■岡山営業所/〒700-0954 | 岡山県岡山市南区米倉30-102              | TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555 |
| ■福岡営業所/〒811-1204 | 福岡県那珂川市片縄東1-12-1              | TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973 |
| ■信濃大町<br>研修センター  | 長野県大町市大字平22393                | TEL (0261) 23-1678                    |

※取付け工事費が別途必要です。 機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。

販売店



## 介護リフト つるべー 価格一覧

2023年3月現在

### 介護リフト つるべー B・BBセット

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 介護リフト つるべー Bセット        | ¥547,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー 体重計付きBWセット  | ¥747,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー BBセット       | ¥580,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー 体重計付きBBWセット | ¥780,000 (非課税) |

### 介護リフト つるべー F1・F2Rセット

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 介護リフト つるべー F1セット     | ¥558,000~ (非課税) |
| 介護リフト つるべー F1SKKセット  | ¥624,000~ (非課税) |
| 介護リフト つるべー F2Rセット    | ¥619,000~ (非課税) |
| 介護リフト つるべー F2RSKKセット | ¥685,000~ (非課税) |

### 介護リフト つるべー G1・G2Rセット U1・U2Rセット

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 介護リフト つるべー G1セット  | ¥418,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー G2Rセット | ¥469,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー U1セット  | ¥546,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー U2Rセット | ¥603,000 (非課税) |
| 車椅子用ソルベルトセット      | ¥23,100 (税込)   |

### 介護リフト つるべー Y4・Y6セット

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 介護リフト つるべー Y4セット                    | ¥480,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4Wセット 体重計付              | ¥680,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4Tセット 手すり付              | ¥578,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4TWセット 手すり・体重計付         | ¥778,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6セット                    | ¥517,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6Wセット 体重計付              | ¥717,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6Tセット 手すり付              | ¥615,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6TWセット 手すり・体重計付         | ¥815,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4セット Li-PINK            | ¥565,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4Wセット Li-PINK 体重計付      | ¥765,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4Tセット Li-PINK 手すり付      | ¥663,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4TWセット Li-PINK 手すり・体重計付 | ¥863,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6セット Li-PINK            | ¥598,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6Wセット Li-PINK 体重計付      | ¥798,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6Tセット Li-PINK 手すり付      | ¥696,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y6TWセット Li-PINK 手すり・体重計付 | ¥896,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Y4・Y6セット専用手すり(単体)        | ¥107,800 (税込)  |
| リチウムイオン電池                           | ¥41,800 (税込)   |

### 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】 無料点検付き                            | ¥2,310,000 (税込) |
| 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き<br>安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚セット | ¥2,475,000 (税込) |
| 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き<br>安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット  | ¥2,530,000 (税込) |

※無料点検付き:リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック、使用方法の確認(研修) 6年(1回/年)

### 介護リフト つるべー Cセット N-Lift / V-Lift

|                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 介護リフト つるべー Cセット V-Lift (汎用車種対応タイプ) (取付費用別途)<br>専用スリングシート ハーフもしくはフルサイズ 1枚付属                                                                                                  | ¥620,000 (非課税) |
| 介護リフト つるべー Cセット N-Lift (車種限定タイプ) (取付費用別途)<br>※適応車種 HONDA N-BOX / N-BOX+(JF1/2/3/4)<br>HONDA ステップワゴン(RP型・RK型) / ダイハツ TANTO(LA60)<br>※仕様によっては取付られないタイプがありますので、その都度お問い合わせください。 | ¥530,000 (非課税) |
| 専用スリングシート ハーフもしくはフルサイズ<br>※Cセットにはパオ・エヴァ・ハーネスはご使用いただけません。                                                                                                                    | ¥30,800 (税込)   |

製造発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

■本

社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室  
[24時間受付]  
モリトーホームページ  
Email  
FAX (0586) 72-4555

☎ 0120-65-2525  
http://www.moritoh.co.jp  
info@moritoh.co.jp

