
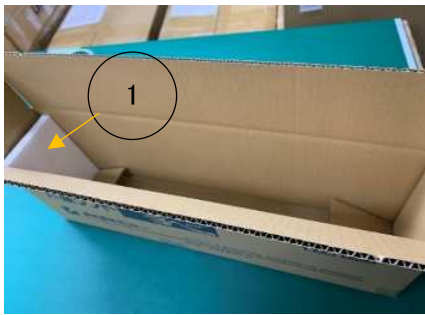


介護リフトつるべ 電装品収納手順

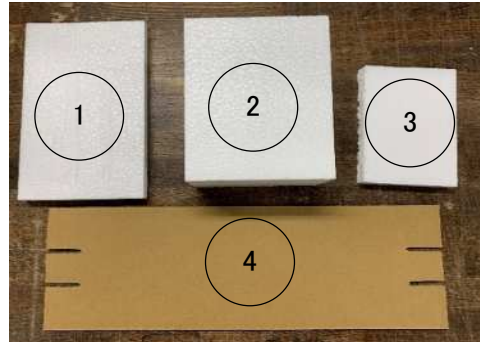

電装品の返却は、専用箱でお願いいたします。
箱サイズは、W 120, D 580, H 190 です。

手順①

ダンボール内に1番の発泡スチロール板を入れます。
箱サイズに合わせてありますので、方向は一定です。
半分のサイズの板は反対側で使用します。



手順②

差し込んだ発泡スチロール板にモーター下部が当たる
ように収納します。
Uリングが上を向くように収納します。
モーターはケース部分の膨らんでいる方を上向きに収
納します。





手順③

モーターのスピンドル部位(筒部分)の横にステンレス棒を入れます。
つまみネジはモーターキャップに付けます。
(付け忘れやすいので、注意して下さい)



手順④

モーターのスピンドル部位の上に4番のダンボール平板を置きます。先端部を折り曲げて使用してください。このときに3番の発泡スチロール板(小サイズ)をモーター先端部側に置いて下さい。



手順⑤

ダンボール平板の上にコントローラーを置きます。方向については左写真を参照してください。
コードはモール等で束ねるか、畳んだ状態で縛ります。
コントローラー収納後、モーターの露出部分との間に2番の発泡スチロールのブロックを挿入してください。






手順⑥
スイッチのコードをまとめ、モーターの上に
置いて下さい。




手順⑦
箱を閉じて、梱包用テープで閉じま
す。

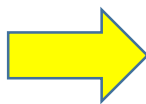

介護リフトつるべ BBセット(支柱)収納手順



BBセット支柱の返却は、専用箱でお願いいたします。
箱サイズは、W 300, D 1400, H 300 で

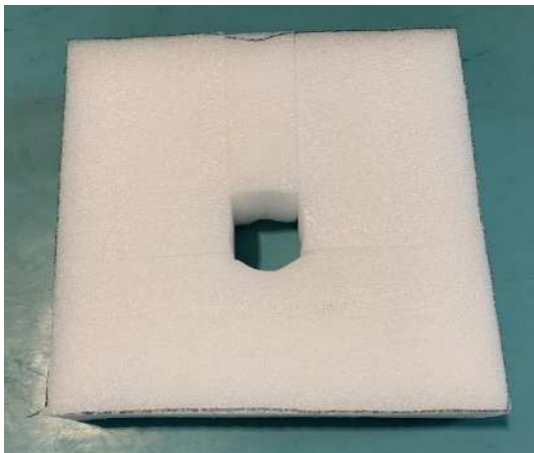

手順①

上方に段差のあるクッション材をおきます。
置き方は写真を参照ください。
クッション材の隙間に支柱を収納してください。この時、支柱下部のベース部の方向を合わせないと、段ボール箱を破損させることがあります。



手順②

支柱先端部に、クッション材を置き、支柱を固定します。ふたを閉じ梱包します。

介護リフトつるべ BBセット(アウトリガー)収納手順



BBセットアウトリガーの返却は、専用箱でお願いいたします。
箱サイズは、W 100, D 1840, H60です。
箱の方向は決まっています。



手順①

アウトリガー先端部に二箇所ある、アジャスターを短く収納してください。この時、+ドライバーを使用すると簡単です。アジャスターの収納は、ボルト部分を回転させてください。その他の部位は空転する場合があります。



手順②

箱を閉じて、4箇所以上、固定してください。
また、箱の上下部分もしっかりと固定してください。



介護リフトつるべー BBセット(ベースプレート)収納手順




BBセットベースプレートの返却は、専用箱でお願いいたします。
箱サイズは、W 270, D 465, H 170 です。



工具類は、専用の工具セットにしまいます。



スポンジの蓋をして、段ボールに入れます。

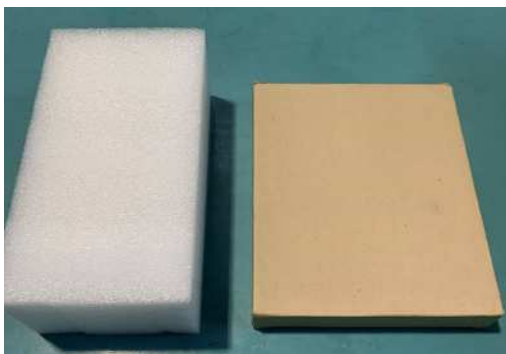

BBセットベースプレートの中に工具セット(ねじ部品・工具)は、不足の無いように梱包前に一度ご確認をお願い致します。
工具セットを同梱して、緩衝材を使用します。



BBセットベースプレートの数量は2種あります。形が違いますので、収納順序は写真を参照ください。



①専用箱を開き、ベースプレート（１）を入れます。



②ベースプレート(1)の上に工具セットを置いて、緩衝材を挟みます。



③上から被せるようにベースプレート（２）を置きます。



④段ボール箱が膨らんでいないことを確認し、テープで封をします。

介護リフトつるべ BBセット(縦型Rパイプ)収納手順




BBセット縦型Rパイプの返却は、専用箱でお願いいたします。
箱サイズは、W 160, D 1350, H 100 です。
箱の方向は決まっています。



BBセットキャスター止め




縦型Rパイプ

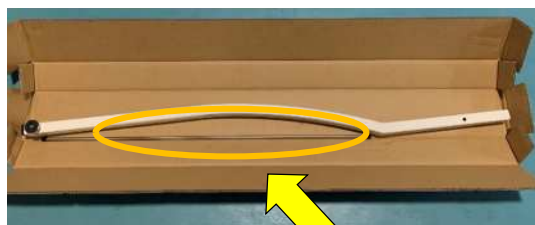

キャスター止め

手順①
縦型Rパイプを置いてください。
BBセットキャスター止めを置き、箱を閉じて、4箇所以上、固定してください。
また、箱の上下部分もしっかりと固定してください。

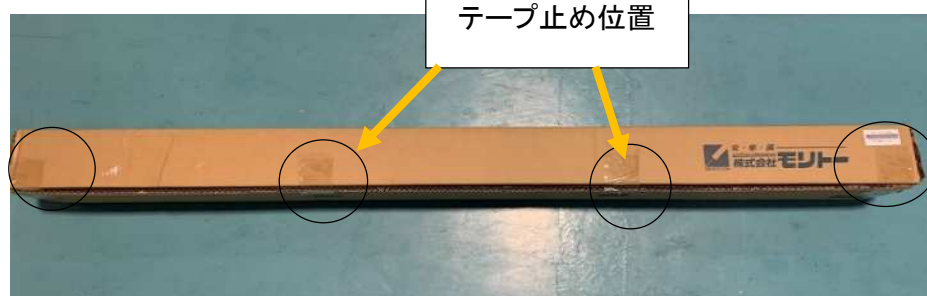


テープ止め位置

介護リフトつるべ BBセット(回転部)収納手順



BBセット縦型Rパイプの返却は、専用箱で
お願いいたします。
箱サイズは、W 330, D 800, H 100 です。
箱の方向は決まっています。

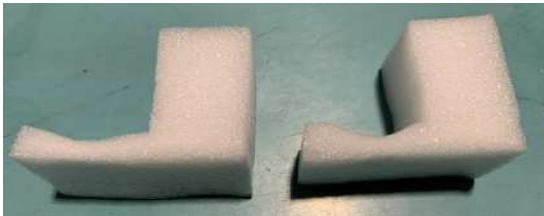

緩衝材は二つ同じものがあります。
写真のように上下に挟み込みます。



③回転部先端部と下部サイドに、
クッション材を置き、回転部を
固定します。ふたを閉じて梱包し
ます。


介護リフトつるべ BBセット(アーム)収納手順



BBセットのアームは、850アームになります。
箱サイズは、W 360, D 1070, H 100 です。
箱の方向は決まっていません。



介護リフトつるべ BBセット(付属品)収納手順

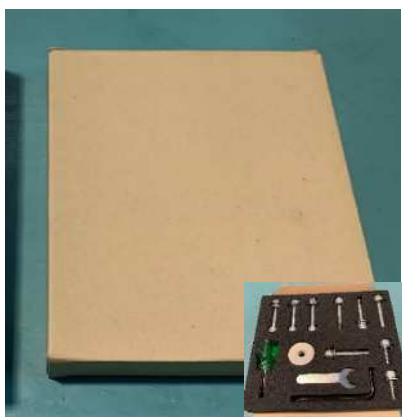

BBセットの付属品はBBセット用工具セット、取扱説明書・リフト使用時の注意点、取扱説明DVDの4点あります。
紛失や欠損に留意してください。