


POPO 用ハーネスライトの装着方法



各部の名称

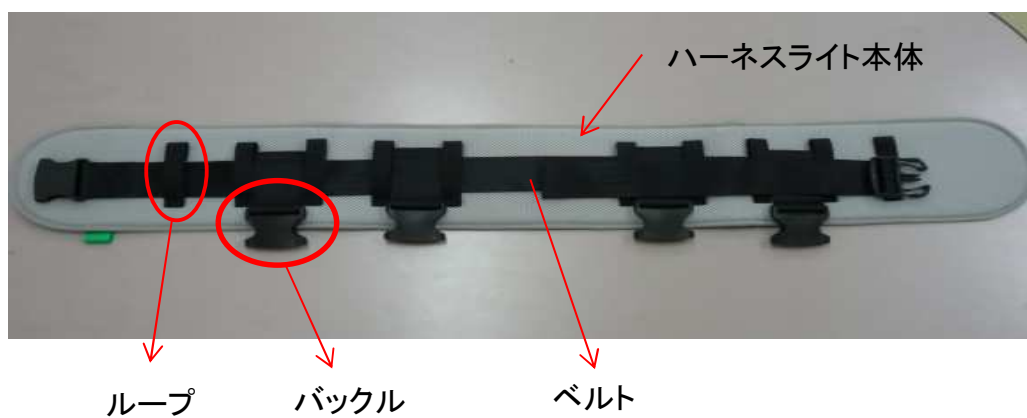

クロッチベルト



POPO 用ラダーベルト

サイズ表



腸骨周り適合目安

S サイズ 72cm～86cm

M サイズ 86cm～100cm

L サイズ 100cm～114cm

※目安寸法ですので、体型・体格により変わってきます。現物で確認していただく事をお勧めいたします。

装着手順

1



POPO用ラダーベルトをベルトに通します。
 ループとループの間ではどこでも使用することができます。
 体型・体格に合わせてラダーベルトの位置を調整して下さい。

2



クrotchベルトを差し込みます。
 注意: バックルには裏と表がありますのでご注意ください。裏側は差込みが出来ません。



差し込む方向はありません

【車椅子(座位姿勢)でのハーネスの着け方】

1




車椅子のブレーキを掛けます。
体を前に少し傾けて、ハーネスを後ろから差し込みます。

2



腸骨の辺りで装着します。

3

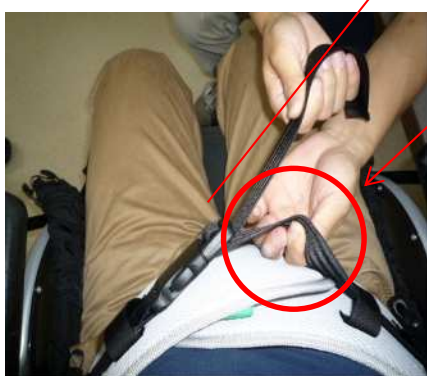

②引っ張ります。

① 少し緩ませます。

ベルトをしっかり締め付けます。
締め付けが出来ない場合は、①少しベルトを緩ませ②引っ張ります。

4



クロッチベルトを前方へ引っ張り出します。
そのまま大腿部の下に通し、バックルに差し込みます。



○

×

注意: クロッチベルトにねじれがないように注意してください。

5



装着完成図

【ハーネスライトをPOPOに装着する方法】

1



車椅子のブレーキを掛けPOPOのアームフックにラダーベルトを引っ掛けます。
 上昇ボタンを押し、ラダーベルトにテンションがかかった時に一旦上昇を止め、
 完全に引っ掛かっているかを確認して下さい。

2



確認後、上昇ボタンでさらに上げて行きます。
 その際、POPOを少し前方へ動かしながら、上昇して行きますと立ち上がりやすくなります。

車椅子へ降ろす際は、反対の手順で行って下さい。

ご注意

- ・耐荷重は100kgとなります。体重が100kgを超える方には、使用できません

お手入れ

- ・吊り具は消耗品です。破れやほつれがないことを確認してから、ご使用して下さい。発見した場合、直ちに使用を中止し、お求めになられた販売店にご連絡ください
- ・消毒は弊社商品じょきん娘を推奨いたします。もしくは、5%グルコン酸クロルヘキシジン溶液を100倍希釈した溶液に浸漬してください。
- ・洗浄は中性洗剤をご使用の上、手洗いをお薦めします。



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリトー



『安・楽・満』

安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが
満ち溢れた社会を創造します!

■ 製造販売元



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリトー

- 本社 〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 札幌営業所 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東 1-1-57-101
TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
- 仙台営業所 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原 6-9-22
TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
- 埼玉営業所 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-6-103
TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649
- 東京営業所 〒143-0025 東京都大田区南馬込 4-16-3
TEL (03) 3777-1648 FAX (03) 3777-1649
- 中部営業所 〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 大阪営業所 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西 2-6-2-B
TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
- 岡山営業所 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉 30-102
TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
- 福岡営業所 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東 1-12-1
TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
- 信濃大町 〒398-0001 長野県大町市大字平 22393
研修センター TEL (0261) 23-1678

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-65-2525

お問合せ [e-mail] info@moritoh.co.jp

ホームページ : <http://www.moritoh.co.jp>

いつでも、どこでも、だれにでも 安・楽・満を提供しつづけることが大切です。
我々も含めたすべての人々が、安らぎと楽しみを満喫できることを願っています。