



MORITOH CORPORATION
株式会社

モリトー

取扱説明書



スリングパオ

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本説明書を最後までお読みいただき、禁止事項、使用上の注意事項、正しい操作方法などをご理解の後、ご使用ください。
また本説明書をお読みになった後は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

1. 安全にご使用いただくための注意事項

1-1. 本説明書での表示方法

本書では、注意事項を「危険」、「注意」の二つに区別しています。



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容を記載しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生する内容を記載しています。

【絵表示の例】

1)	 	危険・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に、絵や文章で、具体的な注意事項が記載されています。 (記載例) スリングは消耗品です。使用前後にはベルト・本体にほつれや擦り傷などないか点検してください。
2)		禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に、絵や文章で、具体的な禁止内容が記載されています。
3)		記号は行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近傍に、絵や文章で、具体的な指示内容が記載されています。 (記載例) 人以外のものを吊らないでください。

1-2. 取り扱い全般について

 危険		1. 本説明書の内容を熟知しない人は、使用しないでください。 2. 製品は介護リフトに乗る人の移乗を目的としています。 これ以外の用途には使用しないでください。 3. スリングは消耗品です。使用前後にはベルト・本体にほつれや擦り傷などがないか点検してください。異常がある時はただちに使用を中止してください。
---------------	--	--

1-3. 使用上の注意



危険



- 質量140kg以上を超えて使用すると、スリングが破損するおそれがあります。
ご利用者が落下し、ご利用者が死亡もしくは重大な傷害を負う危険性があります。
使用できる荷重はリフトの取扱説明書に従ってください。
- 左右のベルト長が合わないままの使用はしないでください。
長さが違ったまま使用すると、吊り上げた時にバランスが崩れ、ご利用者が落下し、
ご利用者が死亡もしくは重大な傷害を負う危険性があります。
- 吊り具を首や手首等に引っかけてまま、使用しないでください。
引っかったまま使用すると、過度な圧迫によりご利用者もしくは介助者への
身体への傷害や窒息等により、ご利用者もしくは介助者が死亡もしくは
重大な傷害を負う危険性があります。
- 入浴用として使用しないでください。(パオメッシュは使用可能)



- リフトを動かす前に、ハンガーに他のものが絡まっていないか、確認してください。
- ハンガーに吊り具を着脱するときは、ハンガーが振れないよう、手でおさえてくだ
さい。そのまま作業しますと、思わぬ方向にハンガーが振れ、ご利用者や介護者が
けがをする恐れがあります。
- スリングのツルベルトがハンガーのフック(掛け具)に確実に掛かっていることを
確認してください。外れたままリフトを上げ下げしますと、落下し死亡もしくは重傷
を負う危険性があります。
- ツルベルトを直接ストラップに結ぶことは禁止です。
ツルベルトの強度が低下します。

1-4. 改造について




危険

スリングの改造・補修は絶対に行わないでください。破損によりご利用者が落下し、
ご利用者が死亡もしくは重大な傷害を負う危険性があります。

2. パオの名称、仕様一覧

パオ名称

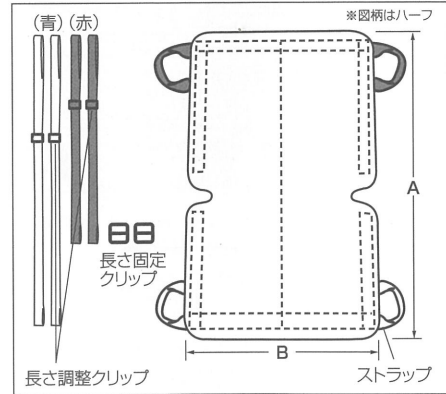

パオ仕様


サイズ	寸法A (cm)	寸法B (cm)	耐荷重 (kg)	ベルト数
ショート	90	50	140	4
ハーフ	100	70	140	4
フル	130	70	140	6
ロング	150	70	140	6

ツルベルト長さ調節範囲


サイズ	色	最大	標準	最小
ショート ハーフ	赤	1,120	600	510
ショート ハーフ	青	830	900	660
フル ロング	青	1,120	900	650
フル ロング	赤	1,120	800	650
フル ロング	青	530	400	340

3. パオメッシュブルーの名称、仕様一覧

パオメッシュハーフ名称

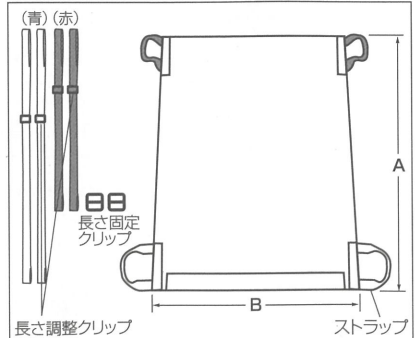

パオメッシュフル名称

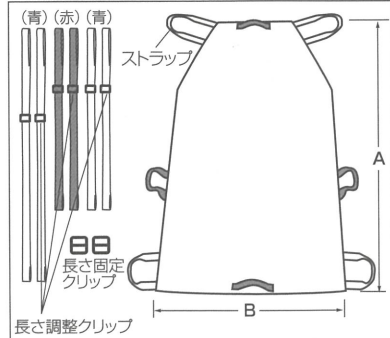

パオメッシュ仕様


サイズ	寸法A (cm)	寸法B (cm)	耐荷重 (kg)	ベルト数
ハーフ	100	70	140	4
フル	140	70	140	6

ツルベルト長さ調節範囲


サイズ	色	最大	標準	最小
ハーフ	赤	800	600	510
ハーフ	青	1,100	900	660
フル	青	1,100	900	660
フル	赤	1,100	800	660
フル	青	500	400	360

4. 使用方法


4-1. パオの敷き込み方 ※図柄はハーフ

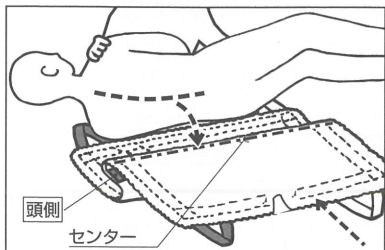

- 側臥位に体位変換し、**頭側**を頭側にセットします。
- 背骨とパオのセンターが合う位置に三つ折にして敷き込みます。
- パオの下端を膝裏側の位置に合わせてください。ベッドの背上げにより、パオの下端と膝裏が合わない場合は、つま先側へ位置を修正してください。



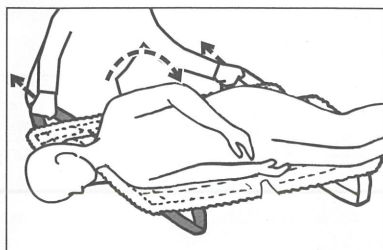


- 反対側に体位変換して下さい。
- 手元のストラップを、手前のほうに2本同時に、ゆっくりと引出して下さい。

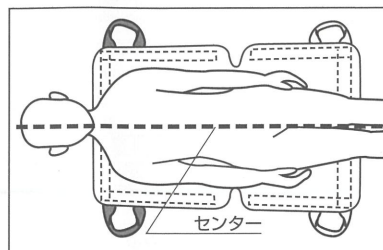

- 体がパオのセンターにあることを確認して下さい。また、体の傾きやねじれなどを直して下さい。
- 体がパオのセンターにないときは、もう一度体位変換してやり直す又はスライディングシート等を使用して、修正してください。体を引きずる行為は床ずれの原因となります。


4-2. ツルベルトの掛け方 ※ツルベルト及びストラップの色…赤 ■ 青 □

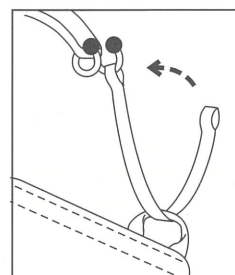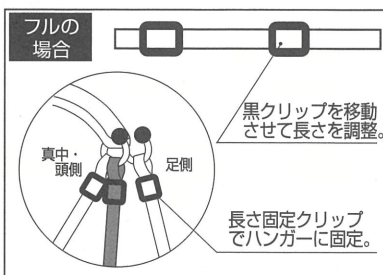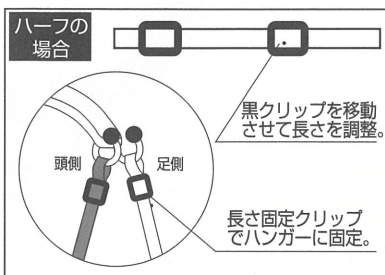


- ベッドのツルベルトの着脱及びリフト上げ降ろしの際は、必ずベッドの背上げをしてから行ってください。
- ツルベルトの色とストラップの色を合わせてご使用ください。
- ツルベルトの長さを調節し最も快適な姿勢にセットして下さい。
(吊り上げた状態でツルベルトの調整はできません。)
- ツルベルトの長さが決まったら付属の長さ固定クリップで止めて下さい。

危険 ツルベルトを直接ストラップに結ぶことは禁止です。ツルベルトの強度が低下します。

4-3. パオの取り外し方 ※図柄はフル

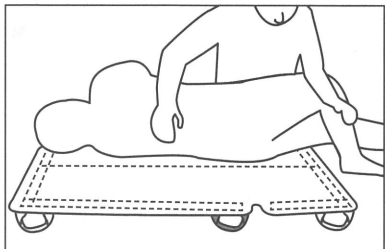

- 側臥位に体位変換します。

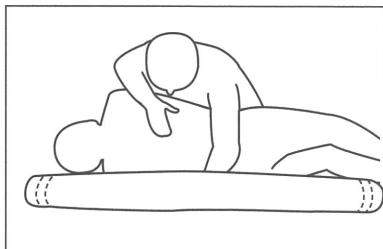


- パオを外側に折り込みます。




- 反対側に体位変換し、パオを抜き取ります。

4-4. 吊り姿勢の一例

ハーフ

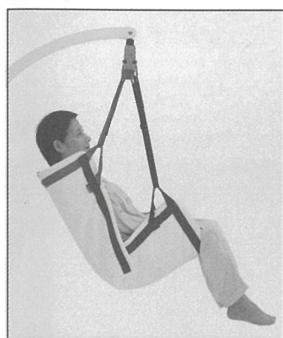

フル

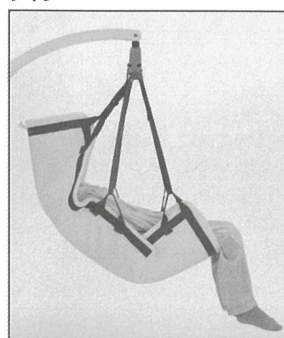

4-5. 車いすへの着座方法


(1) 膝を押す=ブレーキを掛ける

- ①車椅子のブレーキを掛けます。
- ②着座直前に、深く座れる位置まで両膝を背中側に押しながらスイッチを操作してください。



(2) ティルト・リクライニングの角度を合わせる

- ①車いすのブレーキを掛けます。
- ②ご本人の吊り姿勢（角度）に合わせて、ティルト・リクライニングを調整します。
- ③深く座れる位置を確認してスイッチ操作してください。

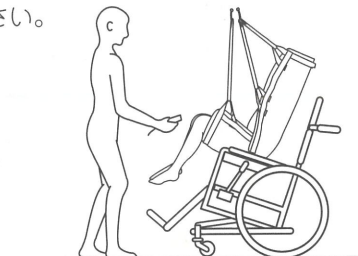

(3) キャスターアップする=ブレーキを解除


- ①車椅子のブレーキを解除し、前方(後方)よりキャスターをアップします。
- ②スイッチを操作して下降させます。この時、ご本人の重さを感じながら徐々に車椅子をもどします。




脚部の引っ掛かりに注意してください。



後方からのキャスターアップでは、ご本人のつま先が視認しにくいいため、注意が必要です。

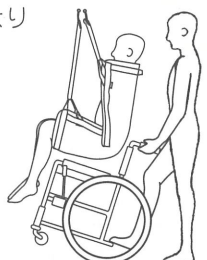

フットサポートを取り外せる場合は、外してください。

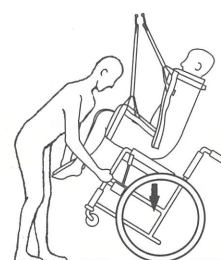

指のはさみに注意してください。車椅子の構造により困難な場合があります。

5. お手入れ

- ・洗濯機で洗う場合は、ネットの使用をお勧めします
- ・オートクレープ(加圧・殺菌)のご使用が可能です(パオメッシュは不可)
- ・乾燥は陰干し、または乾燥機をご使用ください(パオメッシュの乾燥機使用は不可)
- ・乾燥機の大きさによっては、パオがドラム内で回転しない場合がございます。その際は、使用しないでください。
- ・漂白剤は使用しないでください
- ・消毒には福祉用具専門除菌剤「じょきん娘」をお使いください。

■製造発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

お客様相談室 ☎0120-65-2525

【モリトーホームページ】 <http://www.moritoh.co.jp>

【E-mail】 info@moritoh.co.jp

■本社	〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36	TEL (0586) 71-6151	FAX (0586) 72-4555
■札幌営業所	〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101	TEL (011) 708-5200	FAX (011) 708-5201
■東京営業所	〒143-0025 東京都大田区南馬込4-16-3	TEL (03) 3777-1648	FAX (03) 3777-1649
■東京ショールーム	〒143-0025 東京都大田区南馬込4-16-3	TEL (03) 3777-1648	FAX (03) 3777-1649
■中部営業所	〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36	TEL (0586) 71-6151	FAX (0586) 72-4555
■大阪営業所	〒538-0043 大阪府大阪市鶴見区今津南3-2-16	TEL (06) 4258-7105	FAX (06) 4258-7106
■岡山営業所	〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田647-89北1号	TEL (086) 259-2910	FAX (0586) 72-4555(本社直通)
■福岡営業所	〒811-1204 福岡県筑紫郡那珂川町片縄東1-12-1	TEL (092) 953-1892	FAX (092) 953-1973

販売店