

ハーネスベスト装着方法について



ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発商品です。
(※TSV・・・Trunk Support Vest)

装着方法

- 1) ウエストベルトを腰に巻きます。(図 1)
- 2) 背面より①の補助ベルトをウエストベルトに貼り合わせます。(図 2)
- 3) 背面より②の補助ベルトをウエストベルトに貼り合わせます。(図 2)

(図 1)



(図 2)



- 4) 背面のバックルは肩ベルトが腋下に当たらない位置で上下に合わせ、左右に引っ張って下さい。(注意！痛みを伴わない程度で調整して下さい) (図3)
- 5) 通常のウエストベルトで回りきらない場合は、付属の延長ウエストベルトをご使用下さい。(図4)

(図3)




腋下に肩ベルトが当たらないようにバックルを上もしくは下に装着する

(図4)

約 25cm 延長出来ます。



延長ウエストベルト(付属)

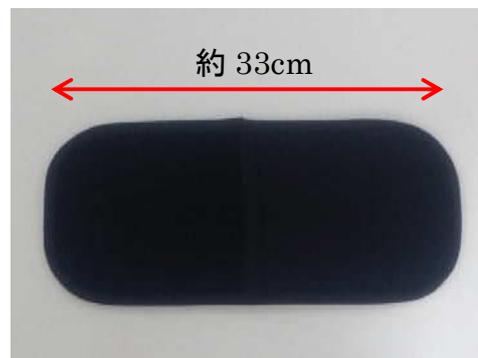

歩行訓練時

転倒防止ストラップに腕を通し、被験者の体幹部をサポートしながら歩行訓練を行います。突然の膝折れ等の転倒リスクを軽減させることができます。



サイズ表記（目安）

	胸囲	ウエスト	身長
Mサイズ	72～96cm	54～84cm	145～175cm
Lサイズ	87～104cm	70～94cm	162～185cm

ストラップ赤 Mサイズ



ストラップ緑 Lサイズ



お手入れ

- ・ハーネスベストは消耗品です。破れやほつれがないことを確認してからご使用下さい。発見した場合、直ちに使用を中止し、お求めになられた販売店にご連絡ください。
- ・消毒は5%グルコン酸クロルヘキシジン溶液を100倍希釈した溶液に浸漬してください。
- ・洗浄は中性洗剤をご使用の上、手洗いをお勧めします。



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリト



『安・楽・満』

安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが
満ち溢れた社会を創造します！

■ 製造販売元



MORITOH CORPORATION

株式会社

モリト

- 本社 千491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 札幌営業所 千063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東 1-1-57-101
TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
- 仙台営業所 千981-1102 宮城県仙台市太白区袋原 6-9-22
TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
- 埼玉営業所 千336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-6-103
TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649
- 東京営業所 千143-0025 東京都大田区南馬込 4-16-3
TEL (03) 3777-1648 FAX (03) 3777-1649
- 中部営業所 千491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- 大阪営業所 千577-0016 大阪府東大阪市長田西 2-6-2-B
TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
- 岡山営業所 千700-0954 岡山県岡山市南区米倉 30-102
TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
- 福岡営業所 千811-1204 福岡県那珂川市片縄東 1-12-1
TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
- 信濃大町 千398-0001 長野県大町市大字平 22393
研修センター TEL (0261) 23-1678

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-65-2525

お問合せ [e-mail] info@moritoh.co.jp

ホームページ : <http://www.moritoh.co.jp>

いつでも、どこでも、だれにでも 安・楽・満を提供しつづけることが大切です。
我々も含めたすべての人々が、安らぎと楽しみを満喫できることを願っています。